

シグマバイロカルトチューブ

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品はウイルス検査材料の輸送を目的とした培地入りチューブである。雑菌抑制剤としてクロラムフェニコール及びアムホテリシンBを含む液体培地2mLを有する。



培地成分（1L中）

ラクトアルブミン加水分解物	3.0g	塩化カリウム	0.2g
リン酸水素二ナトリウム	1.15g	塩化ナトリウム	3.0g
塩化マグネシウム	0.1g	グルコース	1.0g
クロラムフェニコール	0.25g		
アムホテリシン B	0.003g	pH	7.3±0.3

【使用方法等】

- チューブのキャップを外し、綿棒等を用いて採取した検体を液体培地に挿入する。
- チューブのキャップを、しっかりと閉める。
- ラベルに必要事項を記入し、ただちに検査室へ送付する。

【使用上の注意】

- 本品は、培地に抗生物質を含むため、細菌や真菌の輸送には適さない。
- 検査材料の取扱には十分に注意すること。使用後のチューブはオートクレーブなどで滅菌処理してから廃棄すること。
- 使用前に汚染のないことを確かめてから使用すること。
- 検体採取時に、キャップが汚染されないよう注意すること。
- 検体採取後すみやかに検査すること。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法：5～25℃で保存（凍結しないこと）

使用期限：25ヶ月

使用期限はラベルに記載

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者>

イワキ株式会社

<https://www.iwaki-kk.co.jp>

<問い合わせ先>

イワキ株式会社

〒116-0014 東京都荒川区東日暮里四丁目12番1号

TEL 03-6733-0227 FAX 03-6733-0228

E-mail bio@iwaki-kk.co.jp

<製造業者>

Medical Wire & Equipment Company (Bath) Limited
(イギリス)