

新生児・乳児用ネーザルマスク

CPAPまたはBIPAP装置の
単回路に接続して使用できます

Neoq



安定した5点固定




4

種類のマスク展開



使用方法

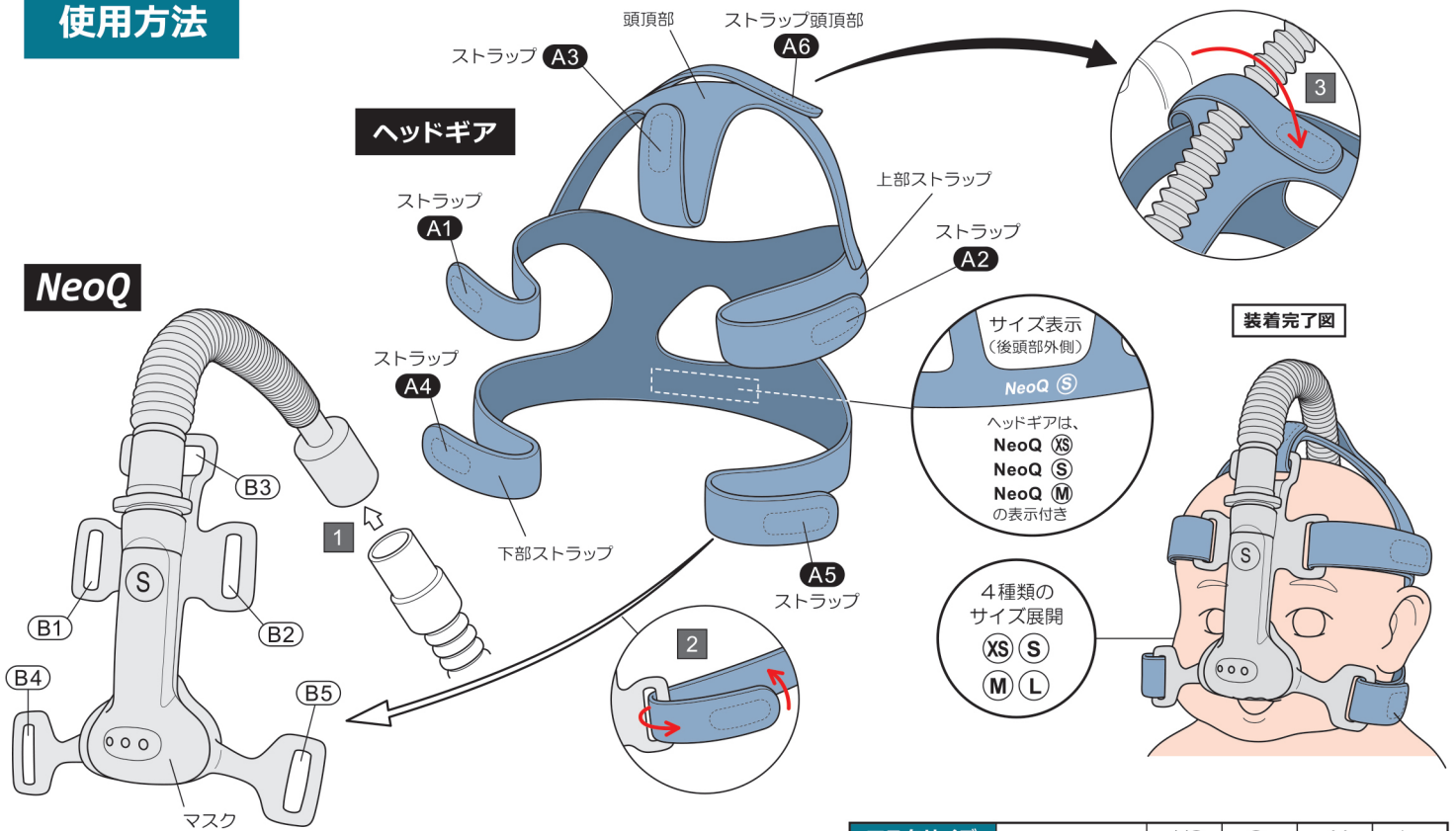

※本製品は単回使用品ですが、シリコン製のマスク本体のみ

洗浄・消毒・滅菌できるようになりました。

※7日間を目安に交換して使用して下さい。

回路の接続

①マスクのチューブを単回路の呼吸回路に接続します **1**。

マスクの準備

- ①マスク本体の頭頂部にある接続部（**B3**）にヘッドギアの頭頂部ストラップ（**A3**）を通し、脱着テープを固定します **2**。
- ②マスク本体上部左右にある接続部（**B1**、**B2**）もヘッドギアの上ストラップ（**A1**、**A2**）を通し、脱着テープを固定します。

マスクの装着

- ①患者頭部にヘッドギアをセットします。
- ②マスク本体の下部左右にある接続部（**B4**、**B5**）にヘッドギアの下ストラップ（**A4**、**A5**）を通し、脱着テープを固定します。
- ③5箇所ヘッドギアストラップの長さを頭周サイズに合わせて調整し、固定します。
- ④必要に応じて、ヘッドギアのストラップ頭頂部（**A6**）を広げ、フレキシブルチューブを固定します **3**。

マスクの脱着

- ①ヘッドギア頭頂部のストラップを外し、フレキシブルチューブを取り外します。
- ②マスク本体の5箇所の接続部からヘッドギアストラップを外します。

マスクサイズ	---	XS	S	M	L
ヘッドギア サイズ表	NeoQ XS	NeoQ S	NeoQ M		
	マイクロ	スモール	ミディアム		
頭頂部	140	150	180		
上部ストラップ	380	470	510		
下部ストラップ	320	420	460		

*単位mm



【製造販売業者】

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4丁目8番2号

【製品に関する問い合わせ先】

〒114-0003 東京都北区豊島7丁目30番17号 (TEL)03-3913-2341 (FAX)03-3913-6003

【製造元】 Hsiner Co., Ltd.