

小児用マスク

Cirri フルフェイスマスク ミニ



CPAPまたはBIPAP装置の単回路に接続して使用できます。

体動に合わせて自由に回路の回転ができ、ねじれを防止できます。



原寸

ミディアム



鼻口用



【4種類のマスクサイズ展開】



■ 4種類のサイズ展開です。ヘッドギアを用いて固定します。



■ シリコン製の額パッドは、固定時の圧迫感を軽減します。



■ 額パッドフレームの角度の調整ができるため安定したフィット感を提供します。



■ エルジョイントおよびチューブとのジョイント部は体動に合わせて360°自由に回転します。



■ エルジョイント部にはCO₂ウォッシュアウトのための呼気ポートがあります。また何らかの理由によりガス供給が途絶えた場合、安全弁を通して呼吸することができます。

Cirri フルフェイスマスク ミニで動作確認が取れました！

- Puritan Bennett™ 520、560シリーズ (コヴィディエン様)
- Vivo 50、60 (チェスト様)
- クリーンエアASTRAL (フクダ電子様)




Vivo 60

使用方法

ヘッドギア

Cirri

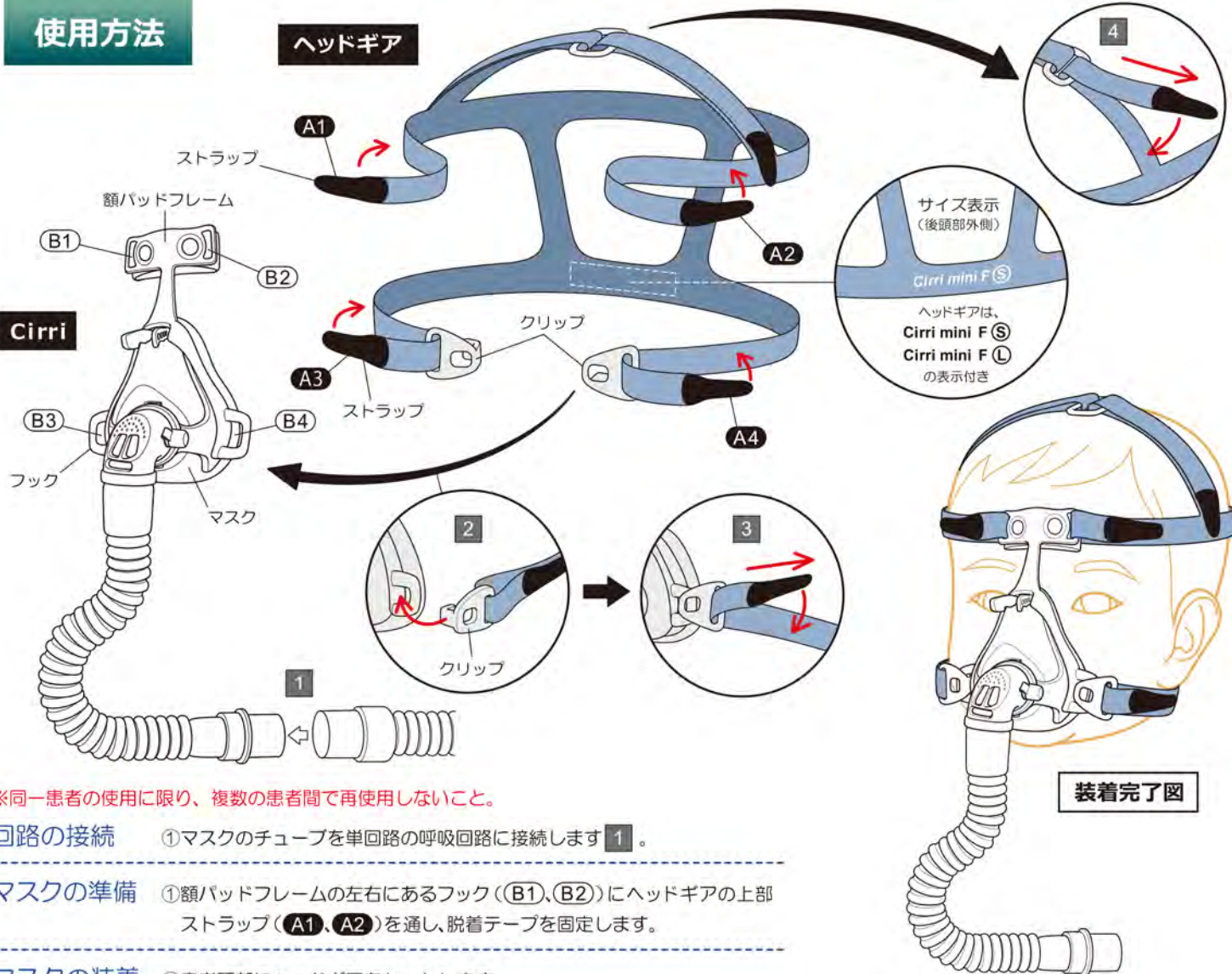

※同一患者の使用に限り、複数の患者間で再使用しないこと。

回路の接続 ①マスクのチューブを単回路の呼吸回路に接続します **1**。

マスクの準備 ①額パッドフレームの左右にあるフック(B1)、(B2)にヘッドギアの上部分ストラップ(A1)、(A2)を通し、脱着テープを固定します。

マスクの装着 ①患者頭部にヘッドギアをセットします。
 ②額パッドフレームに通したヘッドギア・ストラップ(A1)、(A2)をはがし、頭周サイズに合わせて調整し固定します。
 ③マスクの左右のフック(B3)、(B4)にヘッドギア下部のクリップを取り付け **2**、ヘッドギア・ストラップ(A3)、(A4)をはがし、長さを調整し固定します **3**。
 ④頭頂部からヘッドギア・ストラップがすべり落ちないように、長さを調整し固定します **4**。

マスクの脱着 ①マスクのフックからヘッドギア下部のクリップを取り外します。
 ②額パッドフレームに通したヘッドギアの上部分ストラップを外します。

サイズ	スモール		ミディアム		ラージ		Xラージ	
	横	縦	横	縦	横	縦	横	縦
内寸(mm)	28.2	37.0	35.4	42.6	41.2	50.0	46.0	60.0
外寸(mm)	48.3	60.6	54.9	68.0	62.0	78.0	70.5	90.0

ヘッドギア サイズ表示	
フルフェイスマスク ミニ マスクサイズS・M共通	フルフェイスマスク ミニ マスクサイズL・Xラージ共通
Cirri mini F (S)	Cirri mini F (L)

商品コード	商品名	型番	包装単位	JANコード
1547586	Cirri フルフェイスマスク ミニ スモール	呼吸ポート付き 11339	1個	4987019701028
1547562	Cirri フルフェイスマスク ミニ ミディアム	呼吸ポート付き 11340	1個	4987019701004
1547574	Cirri フルフェイスマスク ミニ ラージ	呼吸ポート付き 11341	1個	4987019701011
1573949	Cirri フルフェイスマスク ミニ Xラージ	呼吸ポート付き 11342	1個	4987019701141
1554013*	ヘッドギア (CirriフルフェイスマスクミニSM用)	C 10200-061 FS	1個	4987019701066
1549030*	ヘッドギア (CirriフルフェイスマスクミニL用)	C 10200-052	1個	4987019701035

*「Cirri フルフェイスマスク ミニ」付属品です。

イワキ株式会社

【製造販売業者】

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4丁目8番2号

【製品に関する問い合わせ先】

〒114-0003 東京都北区豊島7丁目30番17号 (TEL)03-3913-2341 (FAX)03-3913-6003

【製造元】 Hsiner Co., Ltd.