

小児用ネーザルマスク Cirri ネーザルマスク ミニ

- ✓ CPAPまたはBIPAP装置の単回路に接続して使用できます。
- ✓ 体動に合わせて自由に回路の回転ができ、ねじれを防止できます。
- ✓ 呼気ポート付き(クリア)と呼気ポート無し(ブルー)を選択できます。
- ✓ 呼気ポート付き(クリア)にXラージサイズを導入しました。



シリコン製のマスククッションと額パッドが鼻と額にやさしくフィット



呼気ポート付き



呼気ポート無し



額パッドフレームの角度の調整ができるため安定したフィット感を提供します

呼気ポート付きでは4種類、呼気ポート無しでは3種類のマスクサイズを展開

【4種類のマスクサイズ展開】

原寸



スモール



ミディアム



ラージ



Xラージ

Cirri ネーザルマスクミニ呼気ポート付きマスクで動作確認が取れました！

- Puritan Bennett™ 520、560シリーズ (コヴィディエン様)
- Vivo 50、60 (チェスト様)
- クリーンエアASTRAL (フクダ電子様)



Cirri ネーザルマスクミニ呼気ポート無しマスクで動作確認が取れました！


- SERVO-i、SERVO-U、SERVO-n (フクダ電子様)

NIV NAVAモード、NIV PSモード、NIV PCモード、Nasal CPAPモード

※マスクコネクタ部に直接呼吸回路のY字管を接続して使用してください。



使用方法

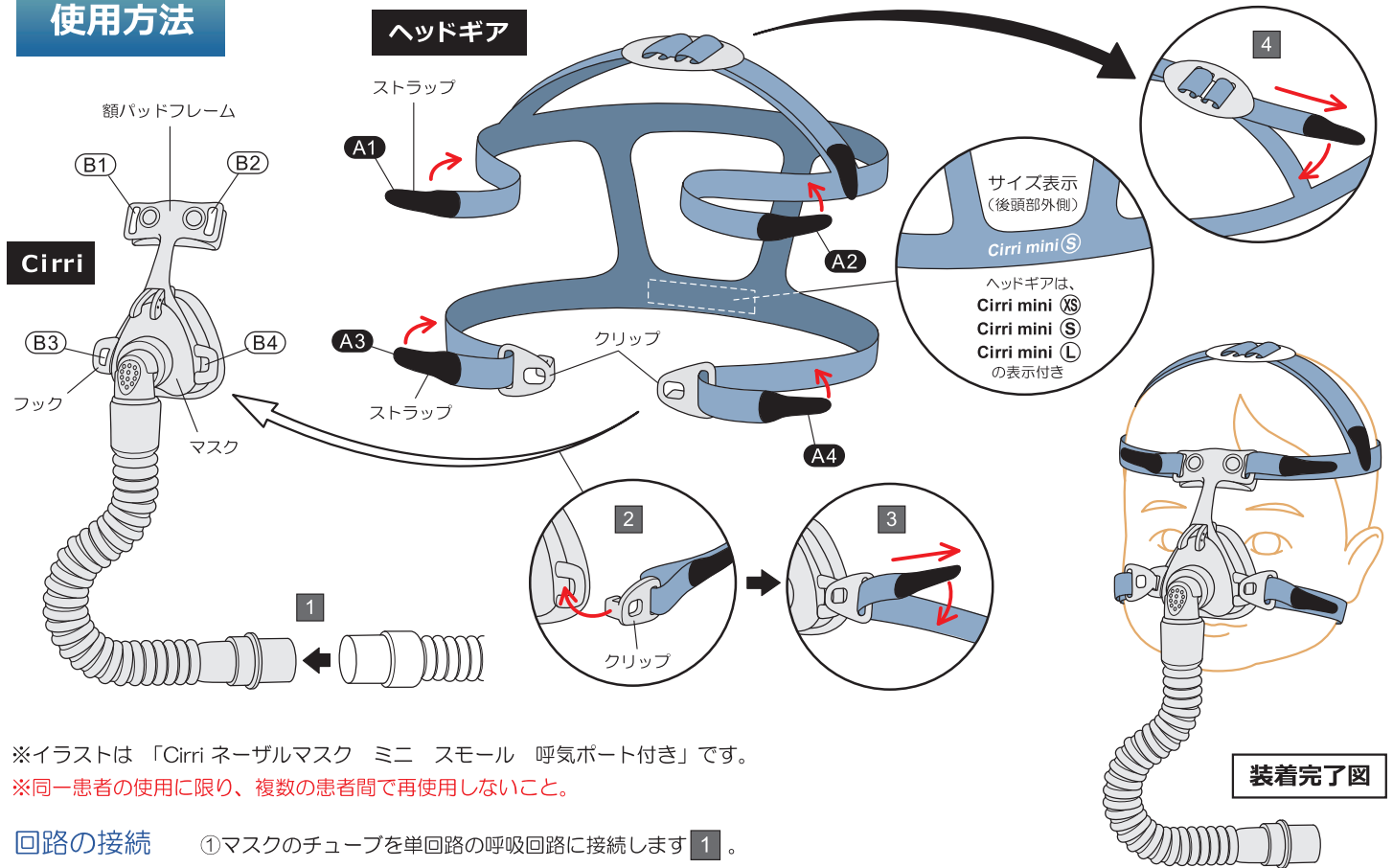

※イラストは「Cirri ネーザルマスク ミニ スモール 呼吸ポート付き」です。

※同一患者の使用に限り、複数の患者間で再使用しないこと。

回路の接続 ①マスクのチューブを単回路の呼吸回路に接続します 1。

マスクの準備 ①額パッドフレームの左右にあるフック((B1)、(B2))にヘッドギアの上部ストラップ((A1)、(A2))を通し、脱着テープを固定します。

マスクの装着 ①患者頭部にヘッドギアをセットします。
 ②額パッドフレームに通したヘッドギア・ストラップ((A1)、(A2))をはがし、頭周サイズに合わせて調整し固定します。
 ③マスクの左右のフック((B3)、(B4))にヘッドギア下部のクリップを取り付け 2、ヘッドギア・ストラップ((A3)、(A4))をはがし、長さを調整し固定します 3。
 ④頭頂部からヘッドギア・ストラップがすべり落ちないように、長さを調整し固定します 4。

マスクの脱着 ①マスクのフックからヘッドギア下部のクリップを取り外します。
 ②額パッドフレームに通したヘッドギアの上部ストラップを外します。

マスクサイズ	スモール		ミディアム		ラージ		Xラージ	
	横	縦	横	縦	横	縦	横	縦
内寸(mm)	18.6	21.0	24.1	22.0	28.0	26.0	32.0	30.0
付属品	ヘッドギア スモール			ヘッドギア ラージ				

ヘッドギア サイズ表示		
ヘッドギア マイクロ	ヘッドギア スモール	ヘッドギア ラージ
Cirri mini XS	Cirri mini S	Cirri mini L

商品コード	商品名	型番	包装単位	JANコード
1439042	Cirri ネーザルマスク ミニ スモール 呼吸ポート付き	11349	1個	4987019700762
1439066	Cirri ネーザルマスク ミニ ミディアム 呼吸ポート付き	11350	1個	4987019700786
1439054	Cirri ネーザルマスク ミニ ラージ 呼吸ポート付き	11351	1個	4987019700779
1616419	Cirri ネーザルマスク ミニ Xラージ 呼吸ポート付き	11352	1個	4987019701233
1488200	Cirri ネーザルマスク ミニ スモール 呼吸ポート無し	11304	1個	4987019700915
1488478	Cirri ネーザルマスク ミニ ミディアム 呼吸ポート無し	11305	1個	4987019700922
1488480	Cirri ネーザルマスク ミニ ラージ 呼吸ポート無し	11306	1個	4987019700939
1481241*	ヘッドギア マイクロ	C10200-051M	1個	4987019700908
1459879*	ヘッドギア スモール	C10200-051	1個	4987019700885
1461953*	ヘッドギア ラージ	C10200-043	1個	4987019700892

*「Cirri ネーザルマスク ミニ」付属品です。ヘッドギア マイクロはマスクサイズスモール、ミディアムのオプションです。



【製造販売業者】

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4丁目8番2号

【製品に関する問い合わせ先】

〒114-0003 東京都北区豊島7丁目30番17号 (TEL) 03-3913-2341 (FAX) 03-3913-6003

【製造元】 Hsiner Co., Ltd.