

仕 様

流量	0～15L/min
Push流量	0～17.5L/min
酸素濃度	21～100%
吸気時間	0.2～2.0秒
アプネア時間	2～20秒
感度	±0.2～2.0cmH ₂ O
振動数	5～20Hz
アンブリチュード	ステップ1～10
O ₂ フラッシュ	+10、+20、+30、100%

モニタリング	nCPAP圧、酸素濃度、呼吸回数、Push回数、トレンド
警報	低CPAP、高CPAP、回路開放、酸素濃度、供給圧異常、 警報消音(2分または5分)、Push作動警報、 セーフティーモード(高優先警報発生時)、バッテリー低下
バッテリー搭載	最大2時間稼働
寸法	290mm(幅)×235mm(奥行)×185mm(高さ)
重量	4.75kg
電源	AC100～240V、50/60Hz、消費電力1.1A

※本製品は医療機器であり、医師または医師の指示下で使用して下さい。
※改良のため、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。予めご了承下さい。
※加温加湿器と併用して使用してください。


付 属 品

ディスプレイ 医療機器製造販売認証番号：224AMBZX00008000 管理医療機器 クラスII

メディジェット1000 nCPAPジェネレーター




- 呼吸仕事量が軽減できます。
- 開放回路の採用により腹部膨満の軽減が期待できます。
- 使用中の音が軽減されています。
- 独自のベンベニスト弁（Benveniste Valve）は、患者に定常流が
- 直接あたらない構造になっています。
- 専用ボンネットを使用することで高い安定性が期待できます。

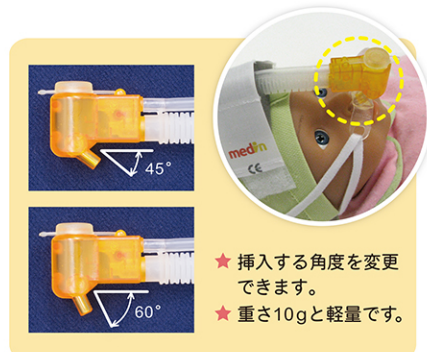


- ★挿入する角度を変更できます。
- ★重さ10gと軽量です。

プロング

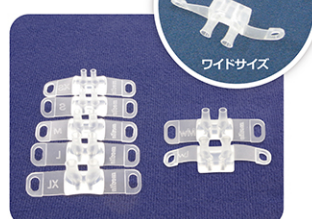

- 日本人の鼻中隔幅にあわせたワイドサイズをリリース


マスク

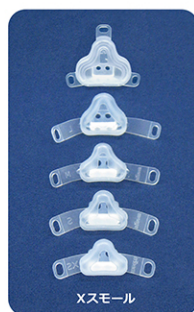

- 小さい児でも対応できる、Xスモールをリリース

回路

- 呼吸回路1207 ヒーター付き

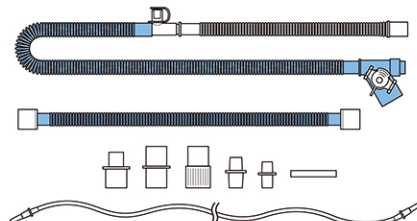

ボンネット

ディスプレイ



- XXS(頭周17～19cm)からXXL(頭周36～40cm)まで8サイズ展開
- 4種類の固定リボンを別販売

付属品一覧表

商品コード	商 品 名	型番	規格
1633326	メディジェット1000	1000	5本入
1633338	メディジェット1000	1000	10本入
1633387	呼吸回路1207	1207	5本入
1633405	プロング Xスモール	1200-01	10個入
1633417	プロング スモール	1200-21	10個入
1633429	プロング ミディアム	1200-02	10個入
1633442	プロング ラージ	1200-22	10個入
1633466	プロング Xラージ	1200-03	10個入
1633430	プロング MW (ミディアムワイド)	1200-32	10個入
1633454	プロング LW (ラージワイド)	1200-33	10個入
1633478	マスク Xスモール	1200-08	10個入
1633480	マスク スモール	1200-04	10個入
1633491	マスク ミディアム	1200-05	10個入
1633508	マスク ラージ	1200-06	10個入
1633510	マスク Xラージ	1200-07	10個入
1633521	マスク Xラージ	1200-07	5個入
1633363	メディジェット1000トライアルキット	---	1セット

商品コード	商 品 名	型番	規格
1315808	ボンネット ディスボタイプXXS 鶯色	1213-10	10個入
1315810	ボンネット ディスボタイプXS 白色	1214-10	10個入
1270278	ボンネット ディスボタイプS 黄色	1215-10	10個入
1270280	ボンネット ディスボタイプM 赤色	1216-10	10個入
1270291	ボンネット ディスボタイプL 水色	1217-10	10個入
1270308	ボンネット ディスボタイプXL 橙色	1218-10	10個入
1270310	ボンネット ディスボタイプXXL 鶯色	1219-10	10個入
1270321	ボンネット ディスボタイプXXXL 白色	1220-10	10個入
1315821	固定リボン ディスボタイプ用 13cm	1212-13	10本入
1289822	固定リボン ディスボタイプ用 15cm	1212-15	20本入
1289860	固定リボン ディスボタイプ用 18cm	1212-18	20本入
1289883	固定リボン ディスボタイプ用 20cm	1212-20	20本入
1535900	固定パッド メディフォーム	1030	10個入
1551309	ボンネット トライアルセット	---	XXS～XXXL 8サイズ81
1447191	スタンドセット	IVS5-IWA01	1セット
1490825	ベンチレータ取り付けレール	ME-1006BIWC	1個
1538706	Cクランプ	ME-1001AHIW1	1個

※定価については弊社までお問い合わせください。



【製造販売業者】

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町四丁目8番2号

【製品に関するお問い合わせ先】

〒116-0014 東京都荒川区東日暮里四丁目12番1号 TEL 03-6733-0224 FAX 03-6733-0225

【製造業者】Medin Medical Innovations GmbH



新生児・小児用 nCPAPドライバー シーエヌオー

CNO_nCPAP Driver



CNO nCPAP Driver


医療機器製造販売承認番号：22600BZX00079000
高度管理医療機器 クラスⅢ 特定保守管理医療機器

CNO nCPAPドライバー

- アプネア時の「Push」回数を設定できる「バックアップ」機能
- 流量を自動調節する「リークアシスト」機能
- nasal CPAPに振動を加えるオシレイトモード
- 自発呼吸をトリガーするSNIPPVモード
- 呼吸刺激を与えるPush機能
- 無呼吸時に刺激を与えるアプネア機能
- 実測値のトレンド表示



モニター

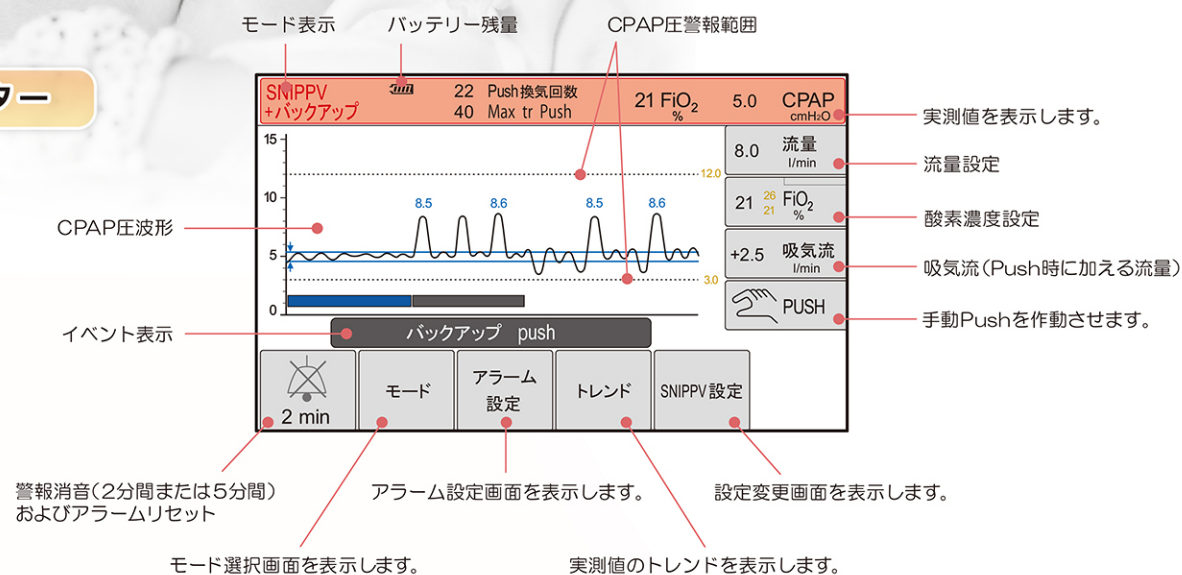


Push機能

設定した流量によるCPAP圧に、さらに一定時間圧力を加えるPush機能により患者へ呼吸刺激を与えることができます。Pushには3種類あり、CPAPの設定流量へ上乗せる流量を決めることでPush時の圧力が決まります。

手動Push：スイッチを押すことで作動するPushです。すべてのモードに共通して行えます。


アプネアPush：設定したアプネア時間経過後に作動するPushです。

トリガーPush：SNIPPVモード時、設定した感度により患者自発呼吸をトリガーして作動するPushです。

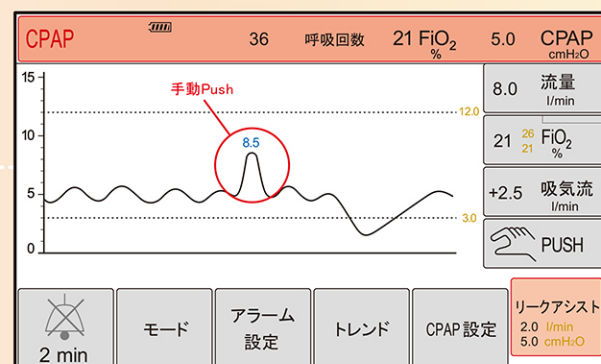

モード

SNIPPVモード

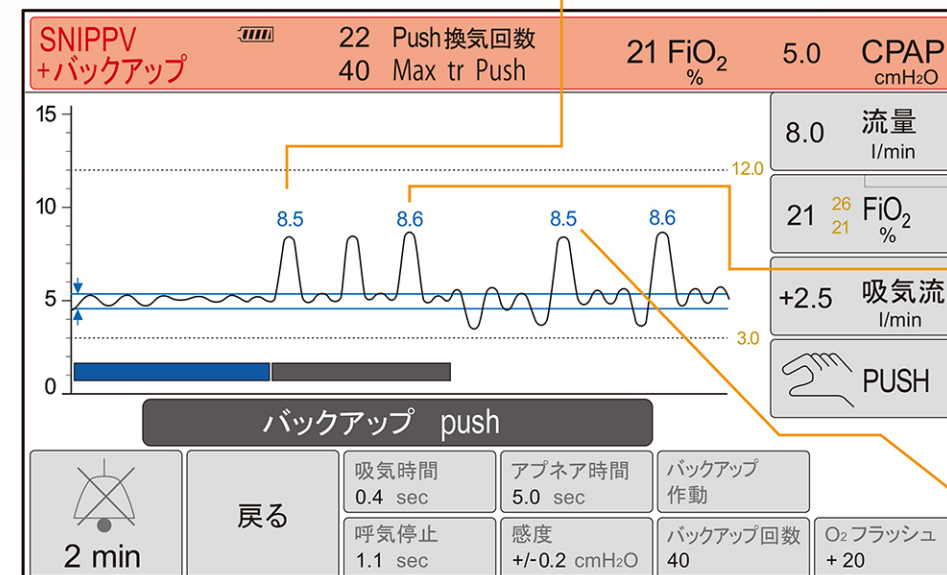

患者自発呼吸と同期させてPushを行うモードです。設定したトリガー感度により患者自発呼吸と同期したPushが可能です。Pushの持続時間は吸気時間として設定できます。

アプネアPush

設定したアプネア時間の間にトリガー感度を超える自発呼吸がなかった場合、アプネアPushが作動します。アプネアPushが作動すると、感知したアプネア時間が波形の下部に青い太線()として表示されます。


バックアップPush

アプネアPush作動後、設定した回数のバックアップ換気が入ります。バックアップ換気が作動すると、波形の下部に灰色の太線()として表示されます。

トリガーPush

設定したトリガー感度範囲を超えるとPushが作動します。

CPAPモード

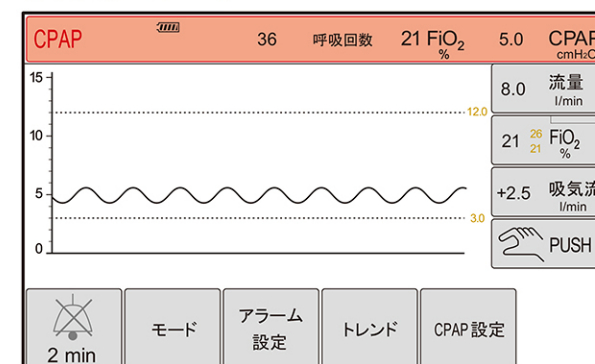


流量規定式のCPAPモードです。手動Pushが可能です。

リークアシスト

リークアシスト機能により、設定した圧に対して±2Lの流量を調整します。




アプネアCPAPモード

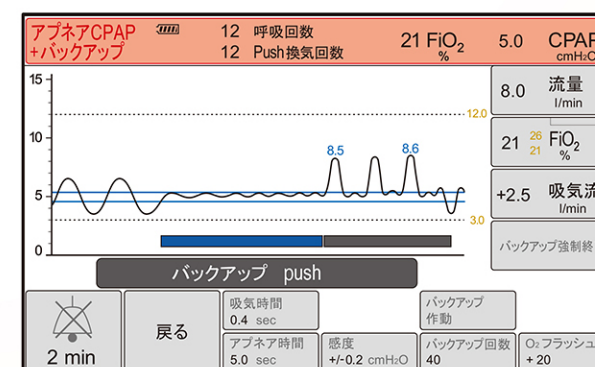

自発呼吸がなかった場合、アプネアPushを行うモードです。Push吸気時間を設定できます。感知したアプネア時間は波形下部に青い太線()として表示されます。

オシレイトモード

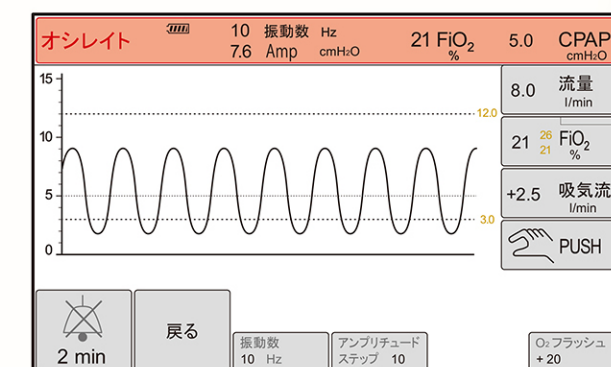

CPAPに振動を加えるモードです。振動数とアンプリチュード(振幅の大きさ)を設定し、患者へ高頻度な振動を与えることができます。