

小児用マスク

Cirri フルフェイスマスク ミニ

CPAPまたはBIPAP装置の単回路に接続して使用できます。

体動に合わせて自由に回路の回転ができ、ねじれを防止できます。

鼻口用



原寸

ミディアム

【4種類のマスクサイズ展開】



■ 4種類のサイズ展開です。ヘッドギアを用いて固定します。



■ シリコン製の額パッドは、固定時の圧迫感を軽減します。



■ 額パッドフレームの角度の調整ができるため安定したフィット感を提供します。



■ エルジョイントおよびチューブとのジョイント部は体動に合わせて360°自由に回転します。



■ エルジョイント部にはCO₂ウォッシュアウトのための呼気ポートがあります。また何らかの理由によりガス供給が途絶えた場合、安全弁を通して呼吸することができます。


Cirri フルフェイスマスク ミニで
動作確認が取れました！

- Puritan Bennett™ 520、560シリーズ
(コヴィディエン様)
- Vivo 50、60 (チェスト様)
- クリーンエアASTRAL
(フクダ電子様)



Vivo 60

使用方法

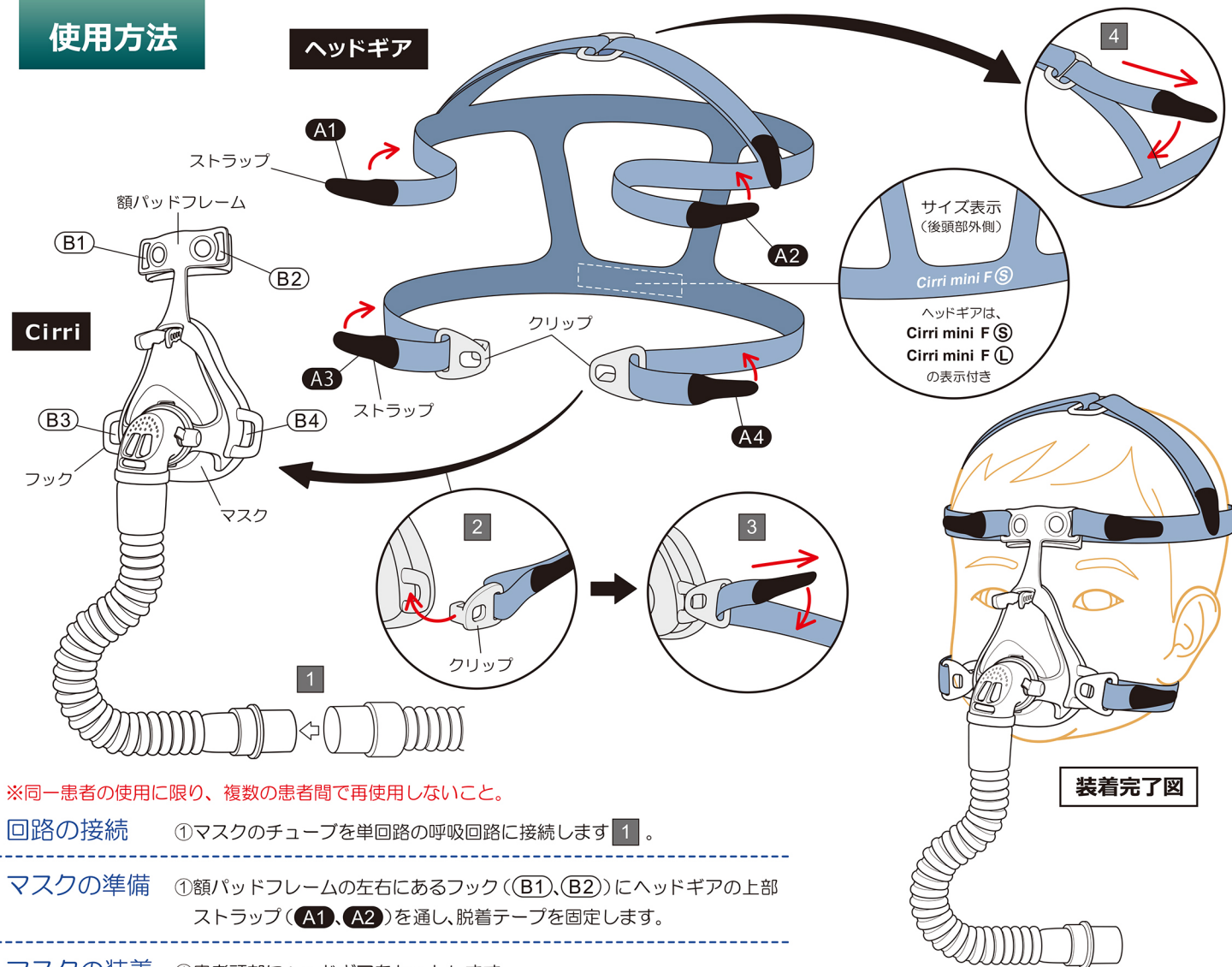

※同一患者の使用に限り、複数の患者間で再使用しないこと。

回路の接続 ①マスクのチューブを単回路の呼吸回路に接続します 1。

マスクの準備 ①額パッドフレームの左右にあるフック (B1、B2) にヘッドギアの上部ストラップ (A1、A2) を通し、脱着テープを固定します。

マスクの装着 ①患者頭部にヘッドギアをセットします。
②額パッドフレームに通したヘッドギア・ストラップ (A1、A2) をはがし、頭周サイズに合わせて調整し固定します。
③マスクの左右のフック (B3、B4) にヘッドギア下部のクリップを取り付け 2、ヘッドギア・ストラップ (A3、A4) をはがし、長さを調整し固定します 3。
④頭頂部からヘッドギア・ストラップがすべり落ちないように、長さを調整し固定します 4。

マスクの脱着 ①マスクのフックからヘッドギア下部のクリップを取り外します。
②額パッドフレームに通したヘッドギアの上部ストラップを外します。

サイズ	スモール		ミディアム		ラージ		Xラージ	
	横	縦	横	縦	横	縦	横	縦
内寸 (mm)	28.2	37.0	35.4	42.6	41.2	50.0	46.0	60.0
外寸 (mm)	48.3	60.6	54.9	68.0	62.0	78.0	70.5	90.0

ヘッドギア サイズ表示	
フルフェイスマスク ミニ マスクサイズ S・M 共通	フルフェイスマスク ミニ マスクサイズ L・Xラージ 共通
Cirri mini F S	Cirri mini F L

商品コード	商品名	型番	包装単位	JANコード
1547586	Cirri フルフェイスマスク ミニ スモール	呼吸ポート付き 11339	1 個	4987019701028
1644439	Cirri フルフェイスマスク ミニ ミディアム	呼吸ポート付き 11340	1 個	4987019701318
1547574	Cirri フルフェイスマスク ミニ ラージ	呼吸ポート付き 11341	1 個	4987019701011
1573949	Cirri フルフェイスマスク ミニ Xラージ	呼吸ポート付き 11342	1 個	4987019701141
1554013*	ヘッドギア (CirriフルフェイスマスクミニSM用)	C 10200-061 FS	1 個	4987019701066
1549030*	ヘッドギア (CirriフルフェイスマスクミニL用)	C 10200-052	1 個	4987019701035

*「Cirri フルフェイスマスクミニ」付属品です。

※定価については弊社までお問い合わせください。



【製造販売業者】

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町四丁目8番2号

【製品に関するお問い合わせ先】

〒116-0014 東京都荒川区東日暮里四丁目12番1号 TEL 03-6733-0224 FAX 03-6733-0225

【製造業者】 Hsiner Co., Ltd.

