

# Infant mio の仕様

## 仕様

対象児	体重 1.5～15kg (1歳未満)
使用箇所	保育器内、コット、ベビーベッドなど
使用温度・湿度範囲	5～35℃、35～85% 但し、急激な温度変化がないこと
保存温度範囲	0～40℃
使用電池	単3形アルカリ乾電池 4本 (約3か月使用可)
体動警報	20秒以上呼吸を含む体動が停止した時、 警報音と警報ランプ点滅
外形寸法 (W×H×D)	モニタ本体：86×118×27mm (固定具除く) 検出マット：270×572×20mm (カバー交換可能)
重量 (kg)	モニタ本体：約0.1kg 検出マット：約1.2kg
付属品	固定具、遠隔アラームユニット、単3アルカリ乾電池 4本
届出番号	13B1X10362N00003

## 構成



●外観、仕様は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。  
※定価については弊社までお問い合わせください。



乳幼児の体動モニター

# Infant mio

い ん ん あ ん と み お

赤ちゃんを見守る見張り番

赤ちゃんの呼吸と身体の動きをいつもモニタリング。

警報音と警報ランプで異常をお知らせします。

赤ちゃんが眠っている間は安心して他の作業ができます。

(病院はもちろん、託児所、保育園、家庭でのご利用をおすすめします)

 **イワキ株式会社**


【製造販売業者】  
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町四丁目8番2号

【製品に関するお問い合わせ先】  
〒116-0014 東京都荒川区東日暮里四丁目12番1号 TEL 03-6733-0224 FAX 03-6733-0225




# Infant mio の仕組み

赤ちゃんが寝ているマットレスや布団の下に敷く検出マット（感知板）が、赤ちゃんの体動を感知し、赤ちゃんの呼吸を含む体動が20秒以上停止、または異常に減少した時に警報ランプと警報音で知らせる装置です。さらにインファントミオは遠隔アラームユニット（有線）が接続できるので、離れた場所（約10m）での作業が可能です。

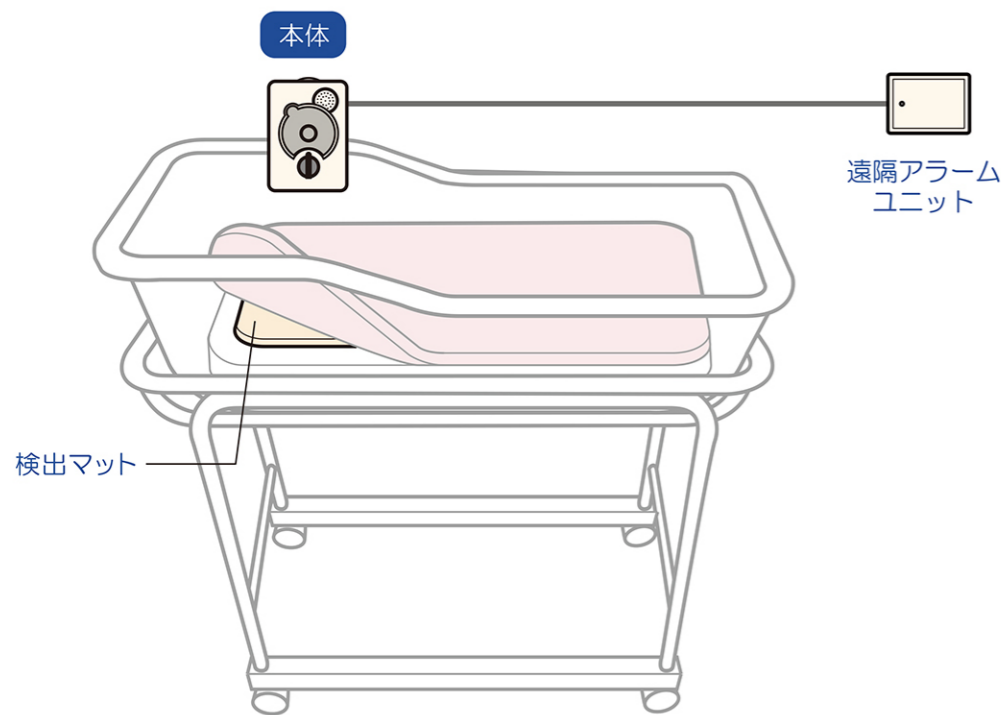


目で、耳で  
確認できるので  
安心です

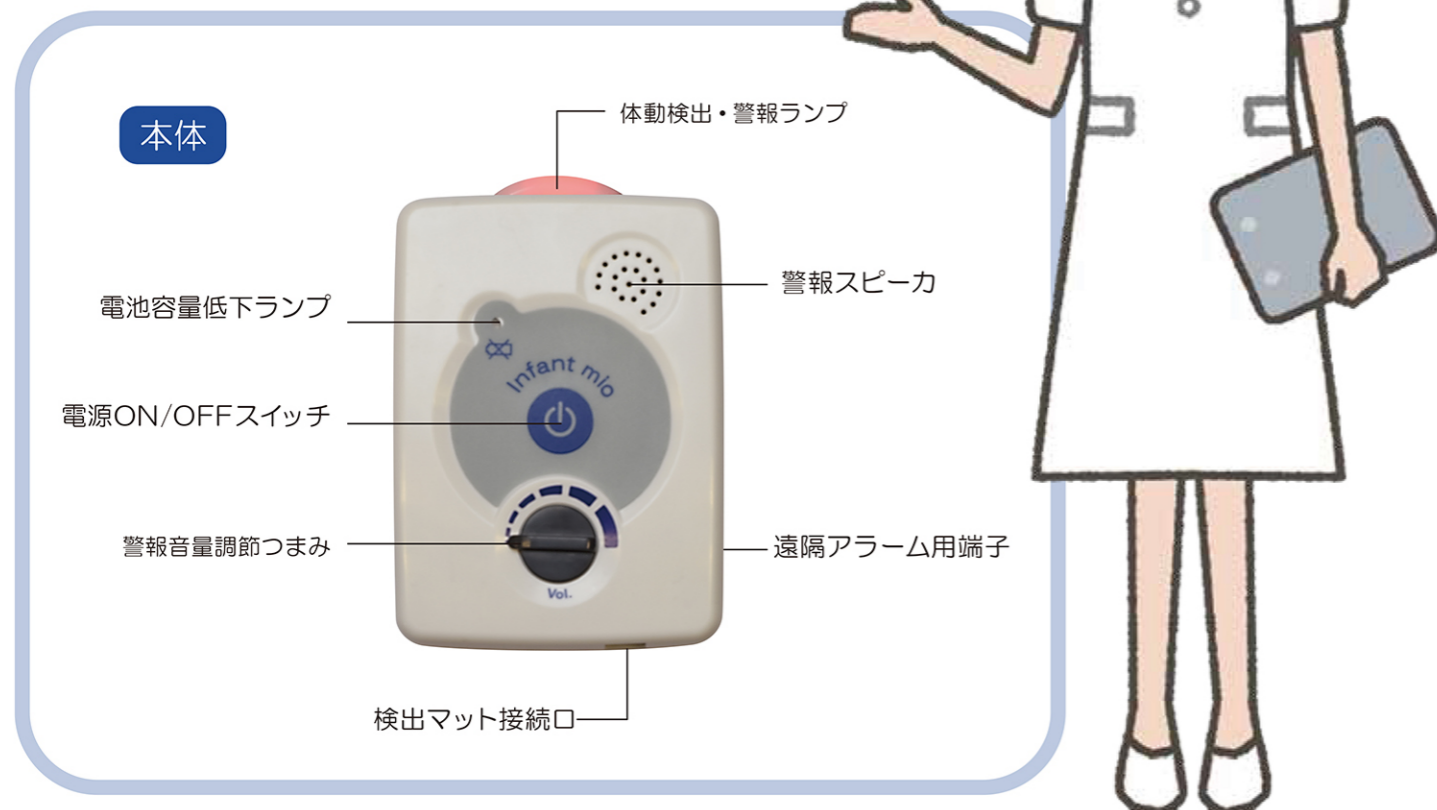


## 乳幼児の救命に寄与します


赤ちゃんが睡眠中に発症する乳幼児突然死症候群（SIDS）は無呼吸による窒息死と言われてはいますが、原因は解明されていない病気です。インファントミオによる呼吸を含む体動のモニタは乳幼児の救命に寄与します。

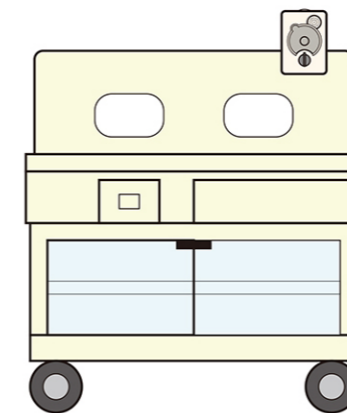

保育器

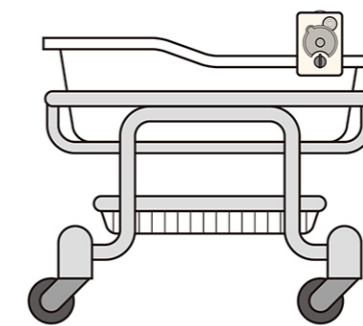

コット

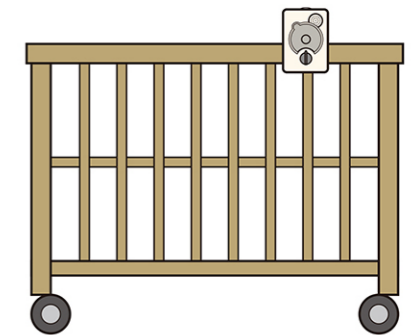

ベビーベッド