


nCPAPジェネレーター

ミニフロー4000


ディスポーザブル

医療機器製造販売認証番号：224AMBZX00008000 管理医療機器 クラスII

■呼吸器との組み合わせでnCPAPが可能になりました！専用呼吸器を必要としない汎用性が高い商品です！

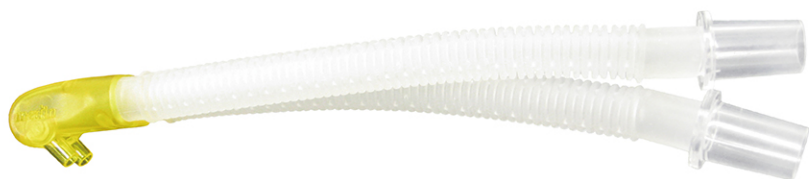


- コルゲート状のチューブは柔軟でキンクしにくいいため、患者の体位変動によって不安定になりがちな固定の問題を解消できます。
- ジェネレーター先端部の角度が調整できるため最適な挿入角度が選択できます。
- 約10gと軽量で患者への負担が軽減されます。
- フィット感のすぐれた専用ボンネットを使用することで高い安定性が期待できます。
- 使用中の送気音が軽減されています。

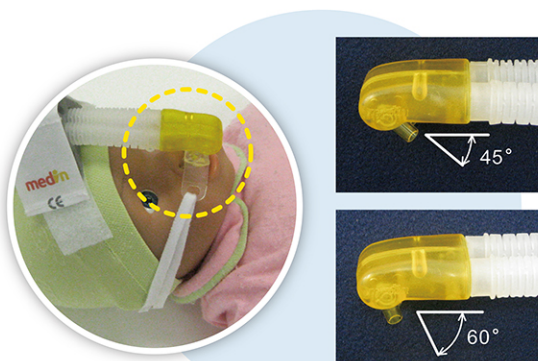


- 挿入する角度を変更できます
- 重さ10gと軽量です

ミニフロー回路図

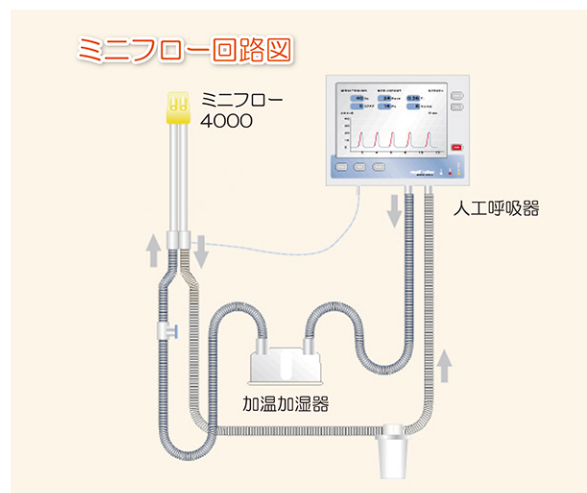

回路

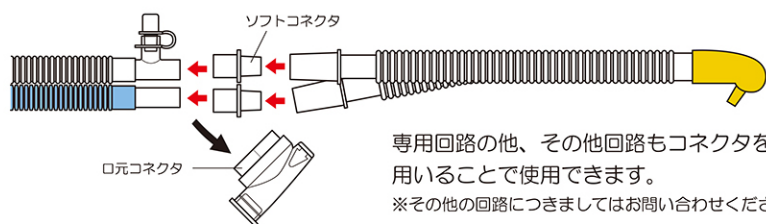

専用回路の他、その他回路もコネクタを用いることで使用できます。
※その他の回路につきましてはお問い合わせください

ロ元コネクタを外し「ソフトコネクタ」を用いることで、ミニフロー4000に接続できます。

動作確認がとれました！

流量制御機能を持ち、かつCPAPモードを有する人工呼吸器とご使用可能です。

- **SERVO-i、SERVO-U、SERVO-n**（フクダ電子様）
Nasal CPAPモード、NIV NAVAモード
- **SLE6000**（東機貿様）
nCPAPモード、NIPPVモード、nHFOモード
- **ベビーログVN500**（ドレーゲル様）—— NIVモード
- **ハミングVue**（メトラン様）—— NIVモード
- **HAMILTON-C1、HAMILTON-T1、HAMILTON-MR1、HAMILTON-C6、HAMILTON-C3**
（日本光電工業様）—— nCPAPモード
- その他メーカー及び機種についてもお問い合わせください。



SERVO-n




SLE6000




ベビーログ
VN500

プロング

■日本人の鼻中間隔にあわせたワイドタイプのプロングを開発！豊富なサイズ展開で、より小さな患者様のために！

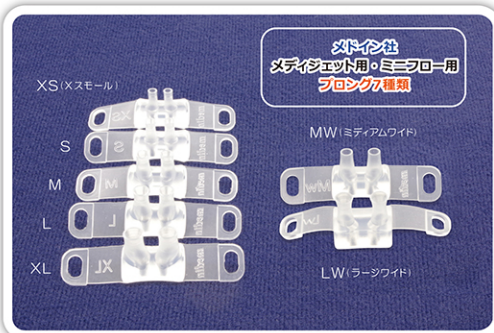


形状	プロングが長く土台への接触を防ぎますフlea形状で上下があります。鼻中間隔が広いタイプがあります。			
接触部	鼻腔			
注意点	挿入はプロング長の1/2～2/3まで（プロングをカットして短くしないでください）			
サイズ	鼻中間隔 (mm)	鼻孔幅 (mm)	プロング長 (mm)	
XS	Xスモール	2.00	3.00	6.00
S	スモール	2.50	3.50	7.50
M	ミディアム	3.40	4.00	9.00
MW	ミディアムワイド	4.60	4.00	9.50
L	ラージ	2.25	4.75	9.00
LW	ラージワイド	4.70	5.00	9.50
XL	Xラージ	4.00	5.50	9.00

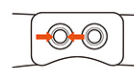

より小さな患者様のために

鼻中間隔2.0mm、鼻孔径3.0mmのマイクロサイズのプロングで、より小さな患者様のケアに対応できます。

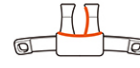


フlea形状（ラッパ状）

全サイズでプロング先端を深く挿入する必要のない形状になっています。鼻の変形を防ぎます。



斜めカットの切り口

患者様鼻側から唇側に向かう切り口を斜めにする事で負担を軽減される設計となっています。

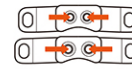


鼻中間隔の広いワイドタイプ登場

鼻中間隔を広げることで、鼻腔への圧迫による鼻腔狭窄、鼻中間隔死、損傷などが軽減される設計となっています。

マスク

■小さい児でも対応できるXスモールサイズをリリース！

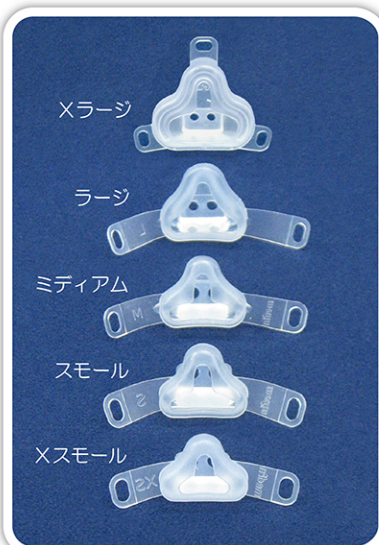

マスクサイズ(内寸)	横	縦
Xスモール	14	11
スモール	19	13
ミディアム	22	17
ラージ	23	19
Xラージ	26	23



Xラージのマスクは固定用リボンを3本使用します

ボンネット・固定リボン

ディスポーザブル

■ミニフローの固定にはミニフォームを用いることでより安定した固定が可能になります。

ディスポーザブルタイプ<8種類>



【固定リボンの別販売しています】

サイズ (4種類) 13、15、18、20cm



ミニフォーム

色	固定リボン長さ	サイズ	顔周 (cm)
うぐいす	13cm	XXS	17-19
白	13cm	XS	19-21
黄	15cm	S	21-23
赤	15cm	M	23-25.5
水色	18cm	L	25.5-28
オレンジ	18cm	XL	28-30
うぐいす	20cm	XXL	30-33
白	20cm	XXXL	33-36

付属品一覧表

商品コード	商品名	型番	規格
1633340	ミニフロー4000	4000	5本入
1633351	ミニフロー4000	4000	10本入
1633405	プロング Xスモール	1200-01	10個入
1633417	プロング スモール	1200-21	10個入
1633429	プロング ミディアム	1200-02	10個入
1633442	プロング ラージ	1200-22	10個入
1633466	プロング Xラージ	1200-03	10個入
1633430	プロング MW (ミディアムワイド)	1200-32	10個入
1633454	プロング LW (ラージワイド)	1200-33	10個入
1633478	マスク Xスモール	1200-08	10個入
1633480	マスク スモール	1200-04	10個入
1633491	マスク ミディアム	1200-05	10個入
1633508	マスク ラージ	1200-06	10個入
1633510	マスク Xラージ	1200-07	10個入
1633521	マスク Xラージ	1200-07	5個入
1633375	ミニフロー4000トライアルキット	---	1セット

商品コード	商品名	型番	規格
1315808	ボンネット ディスポタイプXXS 鶯色	1213-10	10個入
1315810	ボンネット ディスポタイプXS 白色	1214-10	10個入
1270278	ボンネット ディスポタイプS 黄色	1215-10	10個入
1270280	ボンネット ディスポタイプM 赤色	1216-10	10個入
1270291	ボンネット ディスポタイプL 水色	1217-10	10個入
1270308	ボンネット ディスポタイプXL 橙色	1218-10	10個入
1270310	ボンネット ディスポタイプXXL 鶯色	1219-10	10個入
1270321	ボンネット ディスポタイプXXXL 白色	1220-10	10個入
1315821	固定リボン ディスポーザブル用 13cm	1212-13	10本入
1289822	固定リボン ディスポーザブル用 15cm	1212-15	20本入
1289860	固定リボン ディスポーザブル用 18cm	1212-18	20本入
1289883	固定リボン ディスポーザブル用 20cm	1212-20	20本入
1535894	固定パッド ミニフォーム	4030	10個入
1551309	ボンネット トライアルセット	---	XXS~XXXL 8サイズ81
1633399	ソフトコネクタ	1209	10個入

※定価については弊社までお問い合わせください。



【製造販売業者】

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町四丁目8番2号

【製品に関するお問い合わせ先】

〒116-0014 東京都荒川区東日暮里四丁目12番1号 TEL 03-6733-0224 FAX 03-6733-0225

【製造業者】 Medin Medical Innovations GmbH

