

製造販売届出番号 13B1X10362001004 一般医療機器 クラスI

# 新生児・乳児用ネーザルマスク


## NeoQ NV

CPAPまたはBIPAP装置の  
呼吸回路に接続して使用できます



安定した5点固定


4 種類のマスク展開

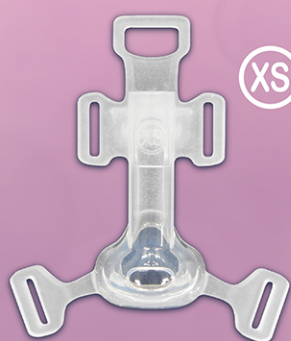

(XS)



(S)

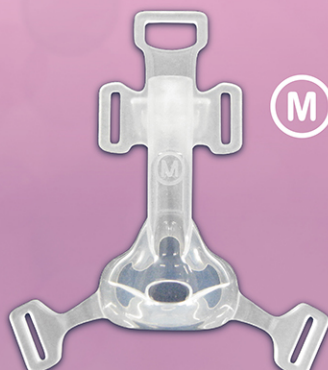


(M)



(L)

# 使用方法

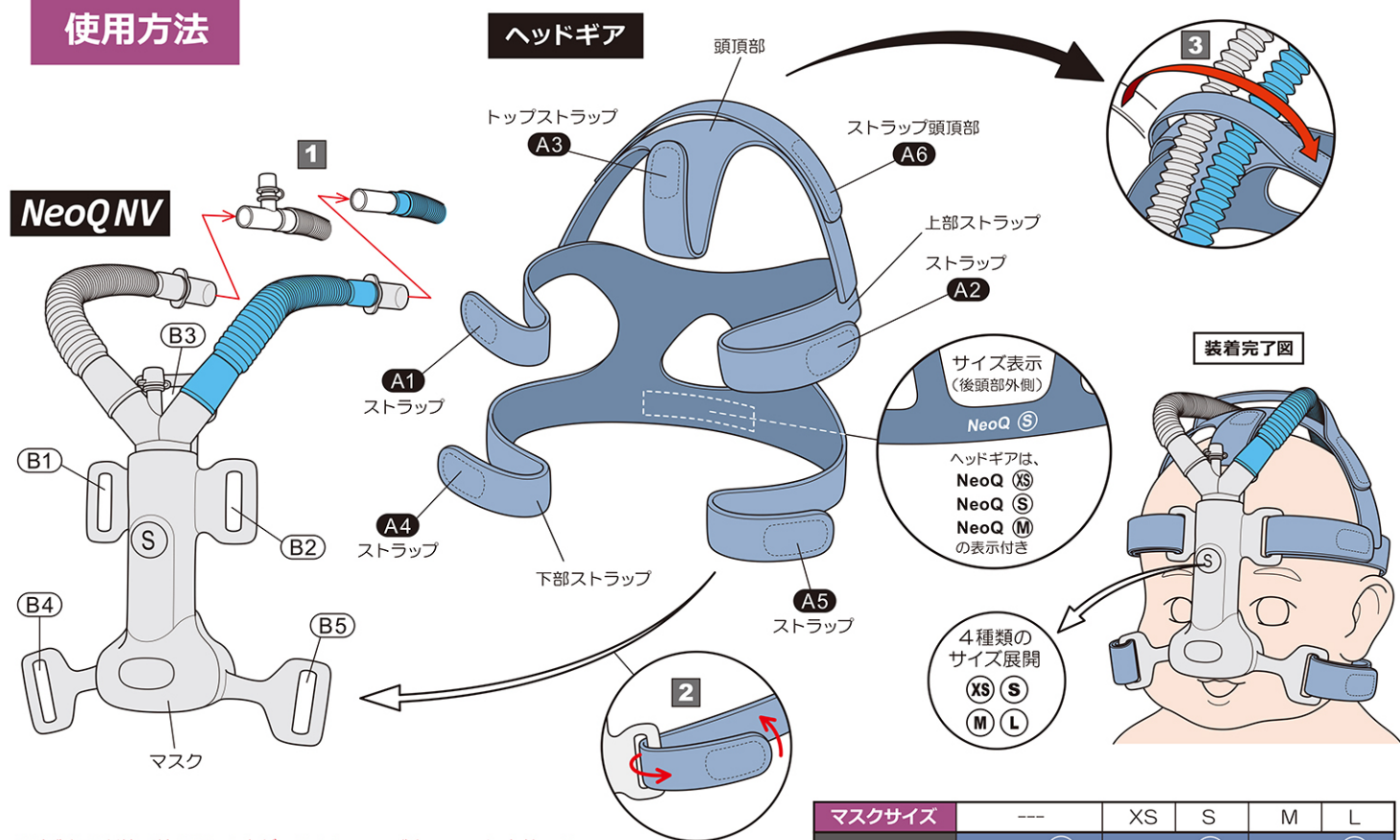

※本製品は単回使用品ですが、シリコン製のマスク本体のみ

洗浄・消毒・滅菌できるようになりました。

※7日間を目安に交換して使用して下さい。

**回路の接続** ①マスクのチューブを呼吸回路に接続します **1**。

**マスクの準備** ①マスク本体の頭頂部にある接続部 (B3) にヘッドギアのトップストラップ (A3) を通し、脱着テープを固定します **2**。  
②マスク本体上部左右にある接続部 (B1、B2) もヘッドギアの上ストラップ (A1、A2) を通し、脱着テープを固定します。

**マスクの装着** ①患者頭部にヘッドギアをセットします。  
②マスク本体の下部左右にある接続部 (B4、B5) にヘッドギアの下ストラップ (A4、A5) を通し、脱着テープを固定します。  
③5箇所ヘッドギアストラップの長さを頭周サイズに合わせ調整し、固定します。  
④必要に応じて、ヘッドギアのストラップ頭頂部 (A6) を広げ、2本のフレキシブルチューブ (吸気側・青と呼気側・白) を固定します **3**。

**マスクの脱着** ①ヘッドギア頭頂部のストラップを外し、2本のフレキシブルチューブ (吸気側・青と呼気側・白) を取り外します。  
②マスク本体の5箇所の接続部からヘッドギアストラップを外します。

| 商品コード    | 商品名                         | 型番           | 包装単位 | JANコード        |
|----------|-----------------------------|--------------|------|---------------|
| 1566209  | NeoQ NV マイクロ 呼吸ポート無し        | 13401        | 1個   | 4987019701134 |
| 1566179  | NeoQ NV スモール 呼吸ポート無し        | 13402        | 1個   | 4987019701103 |
| 1566192  | NeoQ NV ミディアム 呼吸ポート無し       | 13403        | 1個   | 4987019701127 |
| 1566180  | NeoQ NV ラージ 呼吸ポート無し         | 13404        | 1個   | 4987019701110 |
| 1564845* | ヘッドギア マイクロ (NeoQ・NeoQ NV用)  | C10200-067XS | 1個   | 4987019701097 |
| 1503297* | ヘッドギア スモール (NeoQ・NeoQ NV用)  | 10200-045    | 1個   | 4987019700991 |
| 1503285* | ヘッドギア ミディアム (NeoQ・NeoQ NV用) | 10200-049    | 1個   | 4987019700984 |

\*ヘッドギアは「新生児・乳児用ネーザルマスク NeoQ」用、ならびに「新生児・乳児用ネーザルマスク NeoQ NV」用に共通して使用できる医療機器非該当品です。

\*ヘッドギア スモール (NeoQ・NeoQ NV用) は、マスク本体サイズ「マイクロ」および「スモール」の付属品です。

\*ヘッドギア ミディアム (NeoQ・NeoQ NV用) は、マスク本体サイズ「ミディアム」および「ラージ」の付属品です。

\*ヘッドギア マイクロ (NeoQ・NeoQ NV用) は、マスク本体サイズ「マイクロ」および「スモール」を対象としたオプションです。

※定価については弊社までお問い合わせください。



【製造販売業者】

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町四丁目8番2号

【製品に関するお問い合わせ先】

〒116-0014 東京都荒川区東日暮里四丁目12番1号 TEL 03-6733-0224 FAX 03-6733-0225



【製造業者】 Hsiner Co., Ltd.