

新生児・乳児用ネーザルマスク

CPAPまたはBIPAP装置の
単回路に接続して使用できます

Neoq




安定した5点固定

4

種類のマスク展開



使用方法

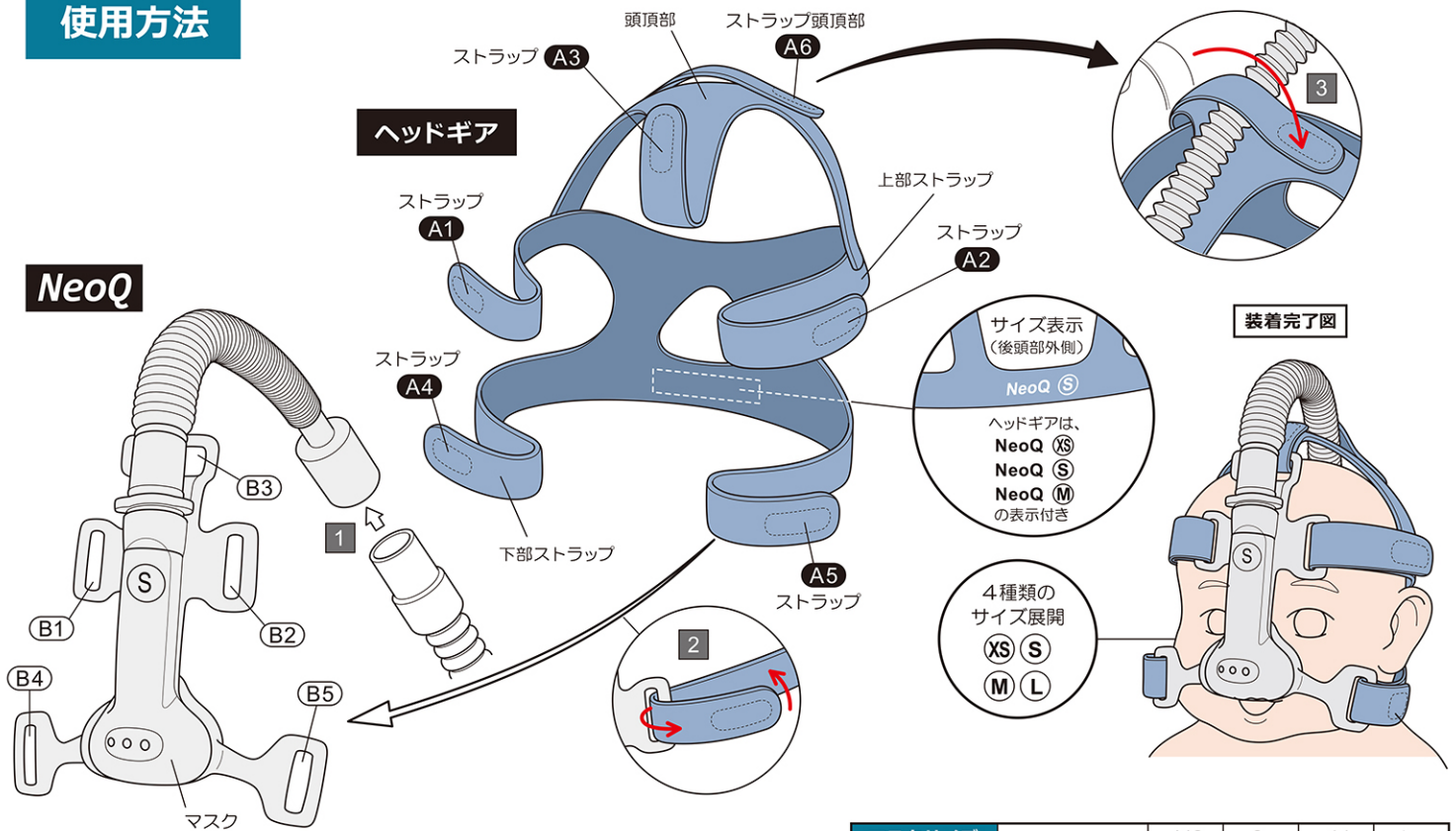

※本製品は単回使用品ですが、シリコン製のマスク本体のみ

洗浄・消毒・滅菌できるようになりました。

※7日間を目安に交換して使用して下さい。

回路の接続

①マスクのチューブを単回路の呼吸回路に接続します 1。

マスクの準備

- ①マスク本体の頭頂部にある接続部 (B3) にヘッドギアの頭頂部ストラップ (A3) を通し、脱着テープを固定します 2。
- ②マスク本体上部左右にある接続部 (B1)、(B2) もヘッドギアの上部ストラップ (A1)、(A2) を通し、脱着テープを固定します。

マスクの装着

- ①患者頭部にヘッドギアをセットします。
- ②マスク本体の下部左右にある接続部 (B4)、(B5) にヘッドギアの下部ストラップ (A4)、(A5) を通し、脱着テープを固定します。
- ③5箇所ヘッドギアストラップの長さを頭周サイズに合わせ調整し、固定します。
- ④必要に応じて、ヘッドギアのストラップ頭頂部 (A6) を広げ、フレキシブルチューブを固定します 3。

マスクの脱着

- ①ヘッドギア頭頂部のストラップを外し、フレキシブルチューブを取り外します。
- ②マスク本体の5箇所の接続部からヘッドギアストラップを外します。

マスクサイズ	---	XS	S	M	L
ヘッドギア サイズ表	NeoQ XS	NeoQ S	NeoQ M		
	マイクロ	スモール	ミディアム		
頭頂部	140	150	180		
上部ストラップ	380	470	510		
下部ストラップ	320	420	460		

*単位mm

*ヘッドギアは「新生児・乳児用ネーザルマスク NeoQ」用、ならびに「新生児・乳児用ネーザルマスク NeoQ NV」用に共通して使用できる医療機器非該当品です。

*ヘッドギア スモール (NeoQ・NeoQ NV用) は、マスク本体サイズ「マイクロ」および「スモール」の付属品です。

*ヘッドギア ミディアム (NeoQ・NeoQ NV用) は、マスク本体サイズ「ミディアム」および「ラージ」の付属品です。

*ヘッドギア マイクロ (NeoQ・NeoQ NV用) は、マスク本体サイズ「マイクロ」および「スモール」を対象としたオプションです。

※定価については弊社までお問い合わせください。



【製造販売業者】

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町四丁目8番2号

【製品に関するお問い合わせ先】

〒116-0014 東京都荒川区東日暮里四丁目12番1号 TEL 03-6733-0224 FAX 03-6733-0225



【製造業者】 Hsiner Co., Ltd.