

新生児・小児用ネーザルカニューラ

# Nuflow



✓ シリコン製のブロングは薄く、柔らかく、快適な装着感を提供します。


✓ シリコンチューブは体動に合わせて自由なポジショニングが可能です。

✓ 解剖学的構造に合わせて設計され、乱気流や抵抗が少なくフロー音が静かな設計となっています。



ディスプレイャブル	① スモール	② ミディアム	③ ラージ	④ Xラージ
ブロング鼻孔幅	2.3mm	2.7mm	3.2mm	3.7mm
ブロング鼻中隔幅	3.7mm	4.3mm	4.8mm	5.3mm
最大流量	10.0 L/min	14.0 L/min	23.0 L/min	27.0 L/min
固定テープ (推奨サイズ)	スモール	スモール	ラージ	ラージ

## サイズチャート

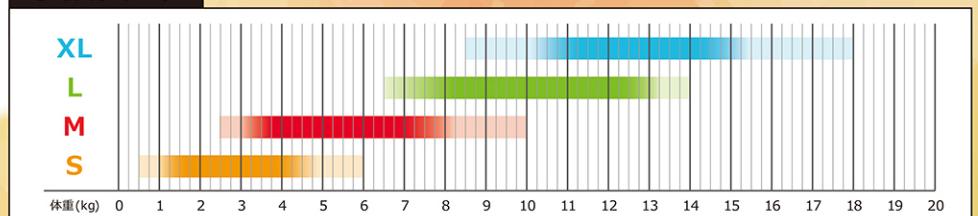

注1. 濃い色は適合サイズ目安、淡い色は適合する可能性のあるサイズ目安を示しています。


注2. 鼻孔面積が50%となるブロングが推奨するサイズです。

注3. 患児の体重は目安としてのみ使用し、鼻孔面積の約50%となるサイズを選択してください。



## 使用方法

- 適切なサイズのネーザルカニューラ Nuflow を選択します (図 1a)。鼻孔の面積が約 50% となるプロングが推奨のサイズです (図 1b)。
- 院内の手順に従って患児の皮膚を清拭します。
- Nuflow をデバイスと加温加湿器に接続された呼吸回路に接続し、ガス流量と温度が安定していることを確認します。必要に応じて付属のコネクタを使用します。
- 付属の固定テープを台紙からはがし (図 2)、L (左頬用)、R (右頬用) の表示にしたがって頬にはりつけます (図 3)。市販のテープを使用することも可能です。
- 台紙からはがした固定テープの内側に付いている薄いフィルムをはがしてから (図 4)、選択したサイズの Nuflow を患児にセットします。
- Nuflow のシリコンチューブについているスライダが回路接続コネクタまで開いていることを確認してから、Nuflow のプロングを鼻孔に挿入します。鼻孔が塞がることのないよう、プロングは鼻孔深くまで挿入しないよう注意してください。固定テープの上部を南向きに引き閉じます (図 5)。
- シリコンチューブが安定する位置まで、スライダをゆっくり頭部に向けて移動させます。
- 固定テープと Nuflow がしっかりと固定できるように、接着面を指で軽く押さえます (図 6)。
- 患児の体動によってシリコンチューブを圧迫することがないように (図 7) 注意してください。

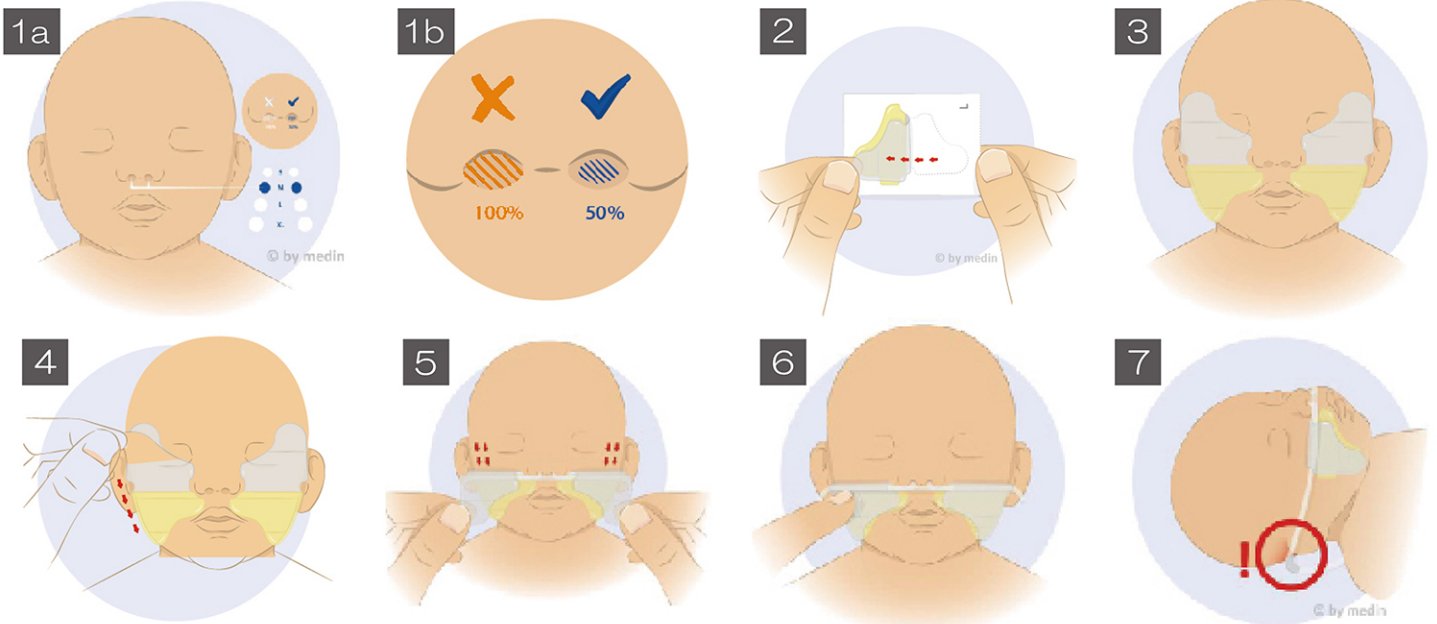

商品コード	商品名	型番	包装単位	JANコード
1633557	Nuflow スモール	1320	10 個入	4987019800448
1633569	Nuflow ミディアム	1330	10 個入	4987019800455
1633570	Nuflow ラージ	1340	10 個入	4987019800462
1633582	Nuflow X ラージ	1350	10 個入	4987019800479
1633594	Nuflow スターターセット S&M	1393	S 5個 M 5個入	4987019800486
1633600	Nuflow スターターセット L&XL	1394	L 5個 XL 5個入	4987019800493
1606608*	固定テープ (Nuflow S&M用)	1380	10 個入	4987019701202
1606610*	固定テープ (Nuflow L&XL用)	1381	10 個入	4987019701219

\*「新生児・小児用ネーザルカニューラ Nuflow」付属品です

※定価については弊社までお問い合わせください。

 **イワキ株式会社**

【製造販売業者】

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町四丁目8番2号

【製品に関するお問い合わせ先】

〒116-0014 東京都荒川区東日暮里四丁目12番1号 TEL 03-6733-0224 FAX 03-6733-0225



【製造業者】 Medin Medical Innovations GmbH