

小児用ネーザルマスク Cirri ネーザルマスク ミニ

- ✓ CPAPまたはBIPAP装置の単回路に接続して使用できます。
- ✓ 体動に合わせて自由に回路の回転ができ、ねじれを防止できます。
- ✓ 呼気ポート付き(クリア)と呼気ポート無し(ブルー)を選択できます。
- ✓ 呼気ポート付き(クリア)にXラージサイズを導入しました。



シリコン製のマスククッションと額パッドが鼻と額にやさしくフィット



呼気ポート付き



呼気ポート無し

呼気ポート付きでは4種類、
呼気ポート無しでは3種類のマスクサイズを展開

【4種類のマスクサイズ展開】

原寸



スモール



ミディアム



ラージ



Xラージ

額パッドフレームの角度の調整ができるため安定したフィット感を提供します

Cirri ネーザルマスクミニ呼気ポート付きマスクで動作確認が取れました！

- Puritan Bennett™ 520、560シリーズ (コヴィディエン様)
- Vivo 50、60 (チェスト様)
- クリーンエア ASTRAL (フクダ電子様)



PB560

Cirri ネーザルマスクミニ呼気ポート無しマスクで動作確認が取れました！

- SERVO-i、SERVO-U、SERVO-n (フクダ電子様)
- NIV NAVAモード、NIV PSモード、NIV PCモード、Nasal CPAPモード


※マスクコネクタ部に直接呼吸回路のY字管を接続して使用してください。



SERVO-n

※呼気ポート付き(クリア)と呼気ポート無し(ブルー)のマスクは、同じサイズです。

使用方法

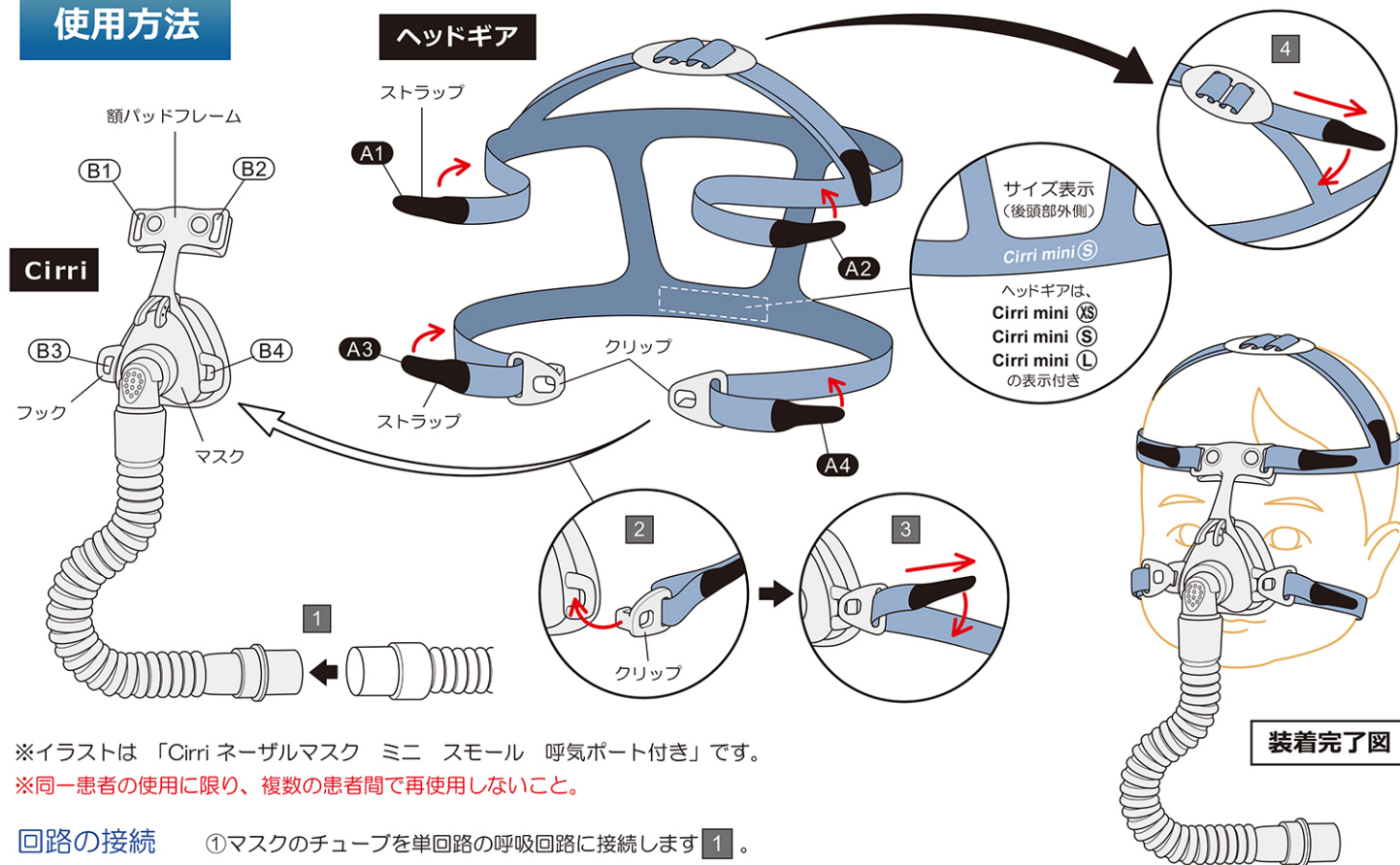

※イラストは「Cirri ネーザルマスク ミニ スモール 呼吸ポート付き」です。

※同一患者の使用に限り、複数の患者間で再使用しないこと。

回路の接続

①マスクのチューブを単回路の呼吸回路に接続します 1。

マスクの準備

①額パッドフレームの左右にあるフック((B1)、(B2))にヘッドギアの上ストラップ((A1)、(A2))を通し、脱着テープを固定します。

マスクの装着

- ①患者頭部にヘッドギアをセットします。
- ②額パッドフレームに通したヘッドギア・ストラップ((A1)、(A2))をはがし、頭周サイズに合わせて調整し固定します。
- ③マスクの左右のフック((B3)、(B4))にヘッドギア下部のクリップを取り付け 2、ヘッドギア・ストラップ((A3)、(A4))をはがし、長さを調整し固定します 3。
- ④頭頂部からヘッドギア・ストラップがすべり落ちないように、長さを調整し固定します 4。

マスクの脱着

- ①マスクのフックからヘッドギア下部のクリップを取り外します。
- ②額パッドフレームに通したヘッドギアの上ストラップを外します。

マスクサイズ	スモール		ミディアム		ラージ		Xラージ	
	横	縦	横	縦	横	縦	横	縦
内寸(mm)	18.6	21.0	24.1	22.0	28.0	26.0	32.0	30.0
付属品	ヘッドギア スモール				ヘッドギア ラージ			

ヘッドギア サイズ表示		
ヘッドギア マイクロ	ヘッドギア スモール	ヘッドギア ラージ
Cirri mini (XS)	Cirri mini (S)	Cirri mini (L)

商品コード	商 品 名				型 番	包装単位	JANコード	
1439042	Cirri	ネーザルマスク	ミニ	スモール	呼吸ポート付き	11349	1 個	4987019700762
1439066	Cirri	ネーザルマスク	ミニ	ミディアム	呼吸ポート付き	11350	1 個	4987019700786
1439054	Cirri	ネーザルマスク	ミニ	ラージ	呼吸ポート付き	11351	1 個	4987019700779
1616419	Cirri	ネーザルマスク	ミニ	Xラージ	呼吸ポート付き	11352	1 個	4987019701233
1488200	Cirri	ネーザルマスク	ミニ	スモール	呼吸ポート無し	11304	1 個	49870197000915
1488478	Cirri	ネーザルマスク	ミニ	ミディアム	呼吸ポート無し	11305	1 個	49870197000922
1488480	Cirri	ネーザルマスク	ミニ	ラージ	呼吸ポート無し	11306	1 個	49870197000939
1481241*	ヘッドギア マイクロ				C10200-051M	1 個	49870197000908	
1459879*	ヘッドギア スモール				C10200-051	1 個	49870197000885	
1461953*	ヘッドギア ラージ				C10200-043	1 個	49870197000892	

*「Cirri ネーザルマスク ミニ」付属品です。ヘッドギア マイクロはマスクサイズスモール、ミディアムのオプションです。

※定価については弊社までお問い合わせください。



【製造販売業者】

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町四丁目8番2号

【製品に関するお問い合わせ先】

〒116-0014 東京都荒川区東日暮里四丁目12番1号 TEL 03-6733-0224 FAX 03-6733-0225



【製造業者】 Hsiner Co., Ltd.