

イワキデジタルカフ圧計

IWAKI Digital Cuff Pressure Gauge



3種類の
モード搭載

圧力の
自動減圧機能

カラー表示
による
視認性の向上

イワキデジタルカフ圧計 仕様

従来品の操作感をそのままに実用性・機能性・視認性に優れたカフ圧計です



- 圧力の自動減圧機能
- 3種類のモードを搭載
 - Tモード：気管内チューブ使用
 - Lモード：ラリングルマスク使用
 - Fモード：制限なし
- カラー表示と検知圧力のメーター表示による視認性の向上

Tモード

低圧時：0-22cmH₂O

規定値：22-32cmH₂O

高圧時：32cmH₂O以上時
瞬時に適正値まで自動減圧

Lモード

低圧時：0-50cmH₂O

規定値：50-60cmH₂O

高圧時：60cmH₂O以上時
瞬時に適正値まで自動減圧

Fモード

上限なし：
メーターは0-120cmH₂O

高圧時：120cmH₂O以上時
瞬時に適正値まで自動減圧

測定範囲	T Mode : 0～63cmH ₂ O・・・1cmH ₂ O刻み（気管内チューブ使用） L Mode・F Mode : 0～126cmH ₂ O・・・2cmH ₂ O刻み（ラリングルマスク使用）		
表示方式	内圧表示 LEDバックライト／各モードによる圧力感知によりバックライト色変化（青：低圧、緑：規定値、赤：高圧）		
アラーム バックライト色	T Mode 【低圧アラーム】 0-22cmH ₂ O／（青画面） 【高圧アラーム】 32cmH ₂ O以上時／瞬時に32cmH ₂ O以下に 自動減圧（赤画面）	L Mode 【低圧アラーム】 0-50cmH ₂ O／（青画面） 【高圧アラーム】 60cmH ₂ O以上時／瞬時に60cmH ₂ O以下に 自動減圧（赤画面）	F Mode 【高圧アラーム】 120cmH ₂ O以上時／瞬時に120cmH ₂ O以下に 自動減圧（赤画面）
自動オフ	圧力がかかっていない状態0-5cmH ₂ O時に60秒未操作（圧力変化無）時にスリープ状態になる。電源LEDは点灯を維持。		
スリープ復帰	①スリープ時に電源ボタンを押す。 ②インフレーションバルブを操作して加圧する。 ③過圧されているチューブを接続する。いずれかの操作を行うことでT Mode状態で復帰。		

商品コード	商品名	品番	規格容量	JANコード	寸法 (mm)	重量 (g)
1377954	イワキデジタルカフ圧計	SPM15	1台	4580198175415	約200×66×50mm	約205g（単3乾電池2本使用時）

※定価については弊社までお問い合わせください。



【製造販売業者】
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町四丁目8番2号

【製品に関するお問い合わせ先】
〒116-0014 東京都荒川区東日暮里四丁目12番1号 TEL 03-6733-0224 FAX 03-6733-0225

【製造業者】 株式会社 ICST

