



酸素供給用経鼻カニューレ

IWAKI ハイフローネーザルカニューラ

ブレンダー、ハイフローオプションを
備えた CPAP デバイスや人工呼吸器と
使用できます。

高流量鼻カニューラ療法 (HFNC) 用の
成人用ネーザルカニューラです。


プロングサイズは4種類



各部説明

7日間を目安に
交換して
使用してください

● シリコン製のプラグで
4サイズ展開しています。

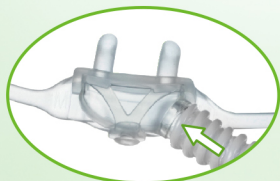

● 本体コネクターは左右どちらにも
プラグを付けることができます。

● ストラップ



● ヘッドギア


● クリップ

● 軽量でフレキシブルな
チューブです。


● アダプター (22OD/15ID) は
滑らかに回転し自由な
ポジショニングが可能です。

装着ガイド

鼻孔の隙間の50%程度となるプラグが
推奨のサイズです。適切なサイズのIWAKI
ハイフローネーザルカニューラを選択して
ください。

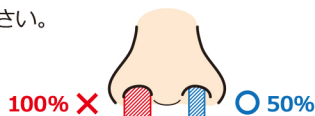


本体コネクターは左右どちらにもプラグ
を付けることができます。
併用するブレンダーやハイフローオプショ
ンを備えた CPAP 装置等の設置位置や回路
のポジショニングにあわせて、プラグの
取り付けを調整してください。

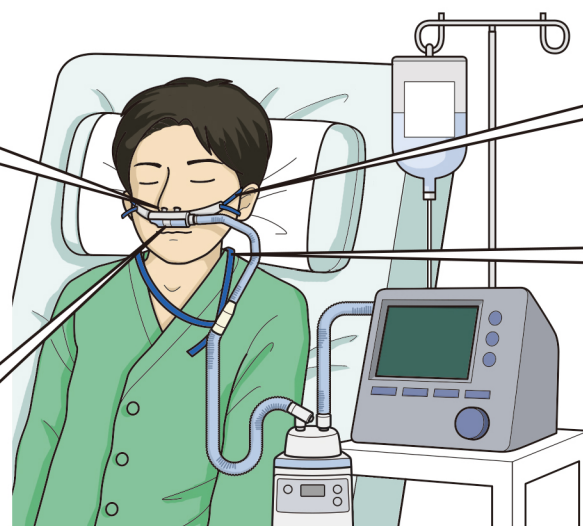

ヘッドギアを調整してください。
締めすぎないように注意してく
ださい。

ストラップを使用することで、鼻
元周りの重みを軽減できます。ま
た回路のテンションがハイフロー
ネーザルカニューラにかかりにく
い固定ができます。

(*1) mm表示の寸法は参考値となります。

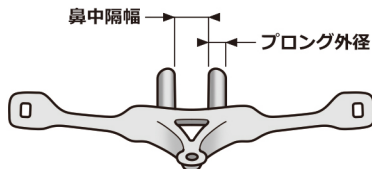

サイズ	鼻中隔幅 (*1)	プラグ外径 (*1)	最大流量
X S	9mm	4mm	30L/min
S	10mm	5mm	40L/min
M	11mm	6mm	60L/min
L	11mm	7mm	60L/min

商品コード	商品名	型番	包装単位	JANコード
1648731	IWAKI ハイフローネーザルカニューラ X S	14952	10個入	4987019701325
1648755	IWAKI ハイフローネーザルカニューラ S	14953	10個入	4987019701332
1648779	IWAKI ハイフローネーザルカニューラ M	14954	10個入	4987019701349
1648792	IWAKI ハイフローネーザルカニューラ L	14955	10個入	4987019701356

イワキ株式会社

【製造販売業者】

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4丁目8番2号

【製品に関する問い合わせ先】

〒114-0003 東京都北区豊島7丁目30番17号
(TEL) 03-3913-2341 (FAX) 03-3913-6003



【製造元】 Hsiner Co., Ltd.

202210500