



酸素供給用経鼻カニューレ

IWAKI ハイフローネーザルカニューラ

カラー表示によるプロングサイズの識別を導入しリニューアル


ブレンダー、ハイフローオプションを
備えたCPAPデバイスや
人工呼吸器と使用できます。

高流量鼻カニューラ療法 (HFNC) 用
の成人用ネーザルカニューラです。

プロングサイズは4種類



イワキ株式会社

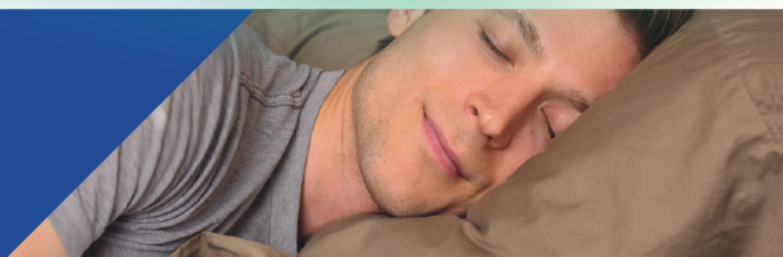

各部説明

- シリコン製のブロングで4サイズ展開しています。



- 本体コネクターは左右どちらにもブロングを付けることができます。

- ストラップ

7 日間を目安に交換して使用してください

- ヘッドギア


- クリップ

- 軽量でフレキシブルなチューブです。

- アダプター (22OD/15ID) は滑らかに回転し自由なポジショニングが可能です。

装着ガイド

鼻孔の隙間の50%程度となるブロングが推奨のサイズです。適切なサイズのIWAKI ハイフローネーザルカニューラを選択してください。

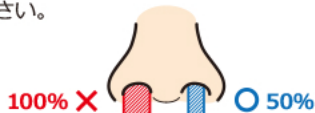


本体コネクターは左右どちらにもブロングを付けることができます。併用するブレンダーやハイフローオプションを備えたCPAP装置等の設置位置や回路のポジショニングにあわせて、ブロングの取り付けを調整してください。

ヘッドギアを調整してください。締めすぎないように注意してください。

ストラップを使用することで、鼻元周りの重みを軽減できます。また回路のテンションがハイフローネーザルカニューラにかかりにくい固定ができます。

アダプターにカラー表示を導入し、ブロングサイズ識別の視認性が向上しました

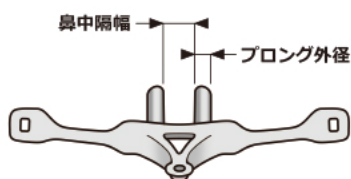

(*1) mm表示の寸法は参考値となります。

サイズ	鼻中隔幅 (*1)	ブロング外径 (*1)	最大流量
XS	9mm	4mm	30L/min
S	10mm	5mm	40L/min
M	11mm	6mm	60L/min
L	11mm	7mm	60L/min

商品コード	商品名	型番	包装単位	JANコード
1648731	IWAKI ハイフローネーザルカニューラ XS	14952	10個入	4987019701325
1648755	IWAKI ハイフローネーザルカニューラ S	14953	10個入	4987019701332
1648779	IWAKI ハイフローネーザルカニューラ M	14954	10個入	4987019701349
1648792	IWAKI ハイフローネーザルカニューラ L	14955	10個入	4987019701356

※定価については弊社までお問い合わせください。



【製造販売業者】

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町四丁目8番2号

【製品に関するお問い合わせ先】

〒116-0014 東京都荒川区東日暮里四丁目12番1号 TEL 03-6733-0224 FAX 03-6733-0225



【製造業者】 Hsiner Co., Ltd.