

機械器具 (06) 呼吸補助器  
一般医療機器 人工呼吸器用マスク JMDNコード: 70564000

# 新生児・乳児用ネーザルマスク NeoQ

## 再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

<適用対象(患者)>

- ・心臓括約筋機能不全、過剰逆流症、過剰せき反応、裂孔ヘルニアの患者には使用しないこと。
- ・自発呼吸のない患者には使用しないこと。

<使用方法>


- ・本品および付属品のヘッドギアは再使用禁止である。

### 【形状・構造及び原理等】

作動原理・機能：人工呼吸器（CPAP または BIPAP 装置を含む）からのガスを供給するためのインターフェースである。人工呼吸器（CPAP または BIPAP 装置を含む）からのガスは、呼吸回路と接続された本品のフレキシブルチューブを介して患者に送られる。脱着テープ式ヘッドギアにより 5 点で固定するため、マスクの位置を自由に調整後、安定した固定が可能である。

本品、本品の構成品および付属品は、単品で輸入され、販売することがある。

製品名	品目コード
新生児・乳児用ネーザルマスク NeoQ マイクロ	呼吸ポート付き 13451
新生児・乳児用ネーザルマスク NeoQ スモール	呼吸ポート付き 13452
新生児・乳児用ネーザルマスク NeoQ ミディアム	呼吸ポート付き 13453
新生児・乳児用ネーザルマスク NeoQ ラージ	呼吸ポート付き 13454

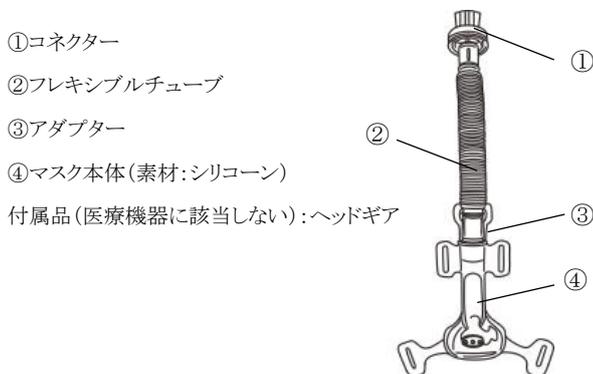

### 【使用目的又は効果】

本品は、人工呼吸器の呼吸回路に接続し、患者の鼻をおおい、患者に人工呼吸器からのガスを供給するためのマスクである。

### 【使用方法等】

#### 1. 使用条件

周囲温度：5～40℃で使用すること。

処方圧範囲：4～20cmH<sub>2</sub>O

#### 2. 使用方法

	<p>(1) 平面でヘッドギアのストラップトップ部(A3)サイド上部(左右 2 箇所 A1,A2)サイド下部(左右 2 箇所 A4,A5)の脱着テープを広げ、マスクを取り付ける位置を確認する。ストラップ頭頂部(A6)を背面にした状態で、(2)へ進む。</p>
	<p>(2) ヘッドギアのストラップサイド上部(A1)の脱着テープをマスク本体の接続部(B1)に下から通し、固定する。(A2とB2、A3とB3も同様に固定する。)</p>
	<p>(3) 患者頭部にヘッドギアをセットする。</p>
	<p>(4) ヘッドギアのストラップサイド下部(A4)の脱着テープをマスク本体の接続部(B4)に通し、固定する。(A5とB5も同様に固定する。)</p>
	<p>(5) 5 箇所のヘッドギアストラップの長さを頭周サイズに合わせ調整し、固定する。</p>
	<p>(6) 必要に応じて、ヘッドギアのストラップ頭頂部(A6)を広げ、フレキシブルチューブを固定する。</p>

<使用方法等に関連する使用上の注意>

- ・人工呼吸器の電源がオンの状態で正常に作動しているとき以外は、本品を装着しない。[正常に作動していないときは、マスクを通じて新鮮な空気が十分供給されず、呼気を再び吸入してしまう可能性がある。]
- ・酸素フローが一定の流量で供給されても、圧設定、患者の呼吸パターン、リーク量に応じて吸入酸素濃度が変動する。
- ・マスク本体に呼気ポートがあることを確認すること。

**【使用上の注意】**

- ・胸部変形、息切れ、胃の膨張、痛み等の症状が患者に見られた場合は、医師に相談すること。
- ・睡眠時の嘔吐リスクを回避するため、本マスクを装着する3時間以内の飲食を避けること。
- ・嘔吐の原因となる薬剤の投与をされている患者に本マスクを使用しないこと。
- ・CPAP 圧が低いと、呼気ポートのエアフローが不十分になり、呼吸回路から呼気ガスをすべて除去できない場合がある。多少の再呼吸が起こることがある。
- ・漂白剤、アルコール溶液、または香料等を含む溶液の使用は本品を硬化し、製品寿命を短縮されるので使用しないこと。
- ・ヘッドギアはきつく締め過ぎないこと。またヘッドギアセット時にマスククッションが前頭部に触れないように調節すること。[頭部変形や発赤の原因となる。]
- ・閉塞を防ぐため、マスクに分泌物がたまっていないか定期的に確認すること。

**【保管方法及び有効期間等】**

保管方法：-20℃～60℃（結露のなきこと）

直射日光を避けて保管する

\*有効期間：5年間（ラベルに記載）

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

<製造販売業者>

イワキ株式会社

<http://www.iwaki-kk.co.jp>

<製品に関する問い合わせ先>

イワキ株式会社

〒114-0003 東京都北区豊島 7-30-17

TEL 03-3913-2341 FAX 03-3913-6003

受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

<製造業者>

Hsiner Co., Ltd.（台湾）