

イワキデジタルカフ圧計

IWAKI Digital Cuff Pressure Gauge



3種類の
モード搭載

圧力の
自動減圧機能

カラー表示
による
視認性の向上

イワキデジタルカフ圧計 仕様

従来品の操作感をそのままに実用性・機能性・視認性に優れたカフ圧計です



Tモード



低圧時：0-22cmH₂O



規定値：22-32cmH₂O



高圧時：32cmH₂O以上時
瞬時に適正値まで自動減圧

Lモード



低圧時：0-50cmH₂O



規定値：50-60cmH₂O



高圧時：60cmH₂O以上時
瞬時に適正値まで自動減圧

Fモード



上限なし：
メーターは0-120cmH₂O



高圧時：120cmH₂O以上時
瞬時に適正値まで自動減圧

■ 圧力の自動減圧機能

■ 3種類のモードを搭載

- Tモード：気管内チューブ使用
- Lモード：ラリゲルマスク使用
- Fモード：制限なし

■ カラー表示と検知圧力のメーター表示による視認性の向上

測定範囲	T Mode : 0~63cmH ₂ O・・・1cmH ₂ O刻み(気管内チューブ使用) L Mode・F Mode : 0~126cmH ₂ O・・・2cmH ₂ O刻み(ラリゲルマスク使用)		
表示方式	内圧表示 LEDバックライト/各モードによる圧力感知によりバックライト色変化(青:低圧、緑:規定値、赤:高圧)		
アラーム バックライト色	T Mode 【低圧アラーム】 0-22cmH ₂ O/(青画面) 【高圧アラーム】 32cmH ₂ O以上時/瞬時に32cmH ₂ O以下に 自動減圧(赤画面)	L Mode 【低圧アラーム】 0-50cmH ₂ O/(青画面) 【高圧アラーム】 60cmH ₂ O以上時/瞬時に60cmH ₂ O以下に 自動減圧(赤画面)	F Mode 【高圧アラーム】 120cmH ₂ O以上時/瞬時に120cmH ₂ O以下に 自動減圧(赤画面)
自動オフ	圧力がかかっていない状態0-5cmH ₂ O時に60秒未操作(圧力変化無)時にスリープ状態になる。電源LEDは点灯を維持。		
スリープ復帰	①スリープ時に電源ボタンを押す。 ②インフレーションバルブを操作して加圧する。 ③過圧されているチューブを接続する。いずれかの操作を行うことでT Mode状態で復帰。		

商品コード	商品名	品番	規格容量	JANコード
1377954	イワキデジタルカフ圧計	SPM15	1台	4580198175415

寸法(mm)	重量(g)
約200x66x50mm	約205g(単3乾電池2本使用時)

【製造販売業者】株式会社 ICST

【製品に関する問い合わせ先】

 **イワキ株式会社**

〒114-0003 東京都北区豊島7丁目30番17号
TEL 03-3913-2341 FAX 03-3913-6003