

Infant mioの仕様

| 仕様 | |
|-------------|---|
| 対象児 | 体重1.5～15kg（1歳未満） |
| 使用箇所 | 保育器内、コット、ベビーベッドなど |
| 使用温度・湿度範囲 | 5～35℃、35～85% 但し、急激な温度変化がないこと |
| 保存温度範囲 | 0～40℃ |
| 使用電池 | 単3形アルカリ乾電池4本（約3ヶ月使用可） |
| 体動警報 | 20秒以上呼吸を含む体動が停止した時 警報音と警報ランプ点滅 |
| 外形寸法（W×H×D） | モニタ本体：86×118×27mm （固定具除く） 検出マット：270×572×20mm （カバー交換可能） |
| 重量 | モニタ本体：約0.1kg、検出マット：約1.2kg |
| 付属品 | 固定具、遠隔アラームユニット、 単3アルカリ乾電池4本 |
| 届出番号 | 13B1X10085A00012 |



乳幼児の体動モニター

Infant mio

赤ちゃんを見守る見張り番

赤ちゃんの呼吸と身体の動きをいつもモニタリング。
警報音と警報ランプで異常をお知らせします。
赤ちゃんが眠っている間は安心して他の作業ができます。
（病院はもちろん、託児所、保育園、家庭でのご利用をおすすめします）



● 外観、仕様は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。



販売業者

イワキ株式会社

〒114-0003 東京都北区豊島7-30-17
TEL. 03-3913-2341 FAX. 03-3913-6003
URL. <http://www.iwaki-kk.co.jp/>



製造販売業者

株式会社スカイネット


〒113-0033 東京都文京区本郷3-42-5 ポア本郷ビル8F
TEL. 03-3814-1133 FAX. 03-3814-1513
URL. <http://www.webskinet.co.jp>

Infant mioの仕組み

赤ちゃんが寝ているマットレスや布団の下に敷く検出マット（感知板）が、赤ちゃんの体動を感知し、赤ちゃんの呼吸を含む体動が20秒以上停止、または異常に減少した時に警報ランプと警報音で知らせる装置です。


さらにインファントミオは遠隔アラームユニット（有線）が接続できるので、離れた場所（約10m）での作業が可能です。

目で、耳で
確認できるので
安心です

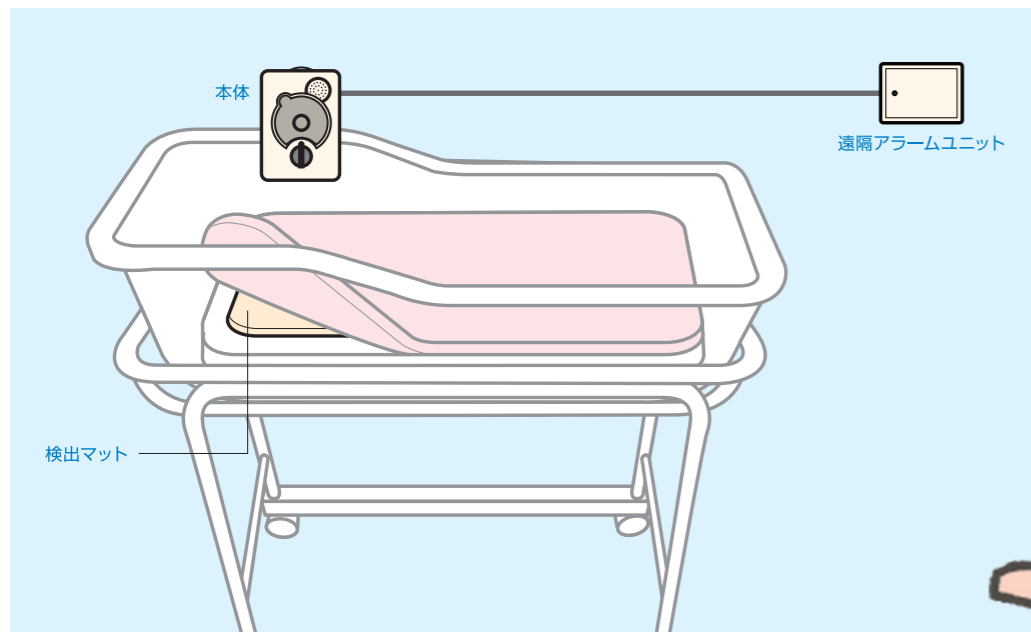

乳幼児の救命に寄与します

赤ちゃんが睡眠中に発症する乳幼児突然死症候群（SIDS）は無呼吸による窒息死と言われていますが、原因は解明されていない病気です。インファントミオによる呼吸を含む体動のモニタは乳幼児の救命に寄与します。

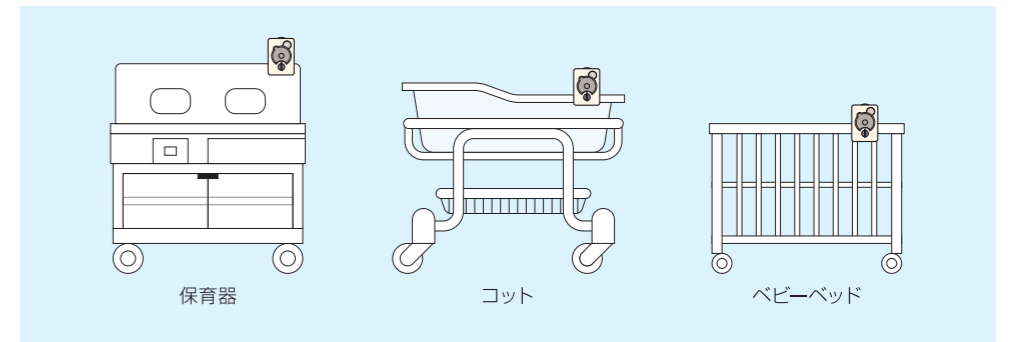

レンタルの取扱い

赤ちゃんがインファントミオを必要とする生育の間、装置一式をレンタルいたします。病院、託児所、保育園、家庭でのご利用をお勧めします。

（申込み方法は販売店へ電話でお問い合わせください。）